

赛康密封圈硅胶U型圈

产品名称	赛康密封圈硅胶U型圈
公司名称	上海爱宝家用医疗器械店
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛康 型号:2000 5000 加长 产地:进口
公司地址	上海市宝山区长逸路15号B幢812室
联系电话	18930581035 18917793401

产品详情

赛康密封圈硅胶U型圈

赛康密封圈

型号：2000 5000 加长

赛康密封圈安装说明

- 1.在取出灭菌盒内密封圈之前,灭菌盒必须打开并冷却
- 2.从任意一个角开始,使用拆卸工具撬松密封圈,同时向下拉出
- 3.一旦一个角落空闲,请抓住密封圈向下拉出,以便将其从灭菌盒中取出。小心不要撕毁密封圈各个角落中的2个定位片(密封圈角上2个突出点)
- 4.清除盒内密封圈后检查并清洁灭菌盒槽中的残留物或碎屑
- 5.使用RPI润滑剂或液体肥皂,完全润滑密封圈就可以准备好安装注意:不必润滑灭菌盒的内部
- 6.安装密封圈时,最好从灭菌盒的后角(进气口处)开始。先安装好四个角,然后将密封圈滑入。将进气孔和它们的定位标签与盒子对齐。定位片必须穿过盒子的孔
- 7.将密封圈一次插入磁带盒的凹槽中

8.当您沿着安装密封圈方向移动时,请检查各个角落以确保定位片

保持原位

9.在完全安装好密封圈后,对所有拐角和所有定位片进行z终检查

10.运行几个测试周期来检查蒸汽是否泄漏。注意:在测试周期中首先听到嘶嘶声是正常的。声音来自多余的液体润滑剂或肥皂液排出后密封正常

11.运行测试循环后,如果蒸汽仍然泄漏,请重新安装密封圈并运行其他测试循环。如果仍然发生蒸汽泄漏,可能问题不是密封圈,而是其他问题

STATIM2000E技术参数:

技术参数

机器尺寸:长 48cm x 宽 41.5 cm x 高 15cm

灭菌卡盒外部尺寸:长 40.5cm x 宽 19.5cm x 高 4cm

灭菌卡盒内部尺寸:长 28cm x 宽 18cm x 高 3.5cm

灭菌卡盒容积:1.8L

水箱容积:4.0公升

重量(不含水):21kg

电压范围:220-240V 50/60Hz,6A

水箱z低水位:550ml

操作环境温度:5 ° C-40 ° C

湿度:z大80%

后置串口:串口