

心电导联线纽扣电极线,EKG Snap Lead

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 心电导联线纽扣电极线,EKG Snap Lead |
| 公司名称 | 青岛柏恩鸿泰电子科技有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省青岛市黄岛区渭河路917#乙2层 |
| 联系电话 | 0532-86959323 18562862572 |

产品详情

【主要结构组成】

由连接仪器的插头、主线缆、连接器、导联线和导联线按钮组成。

【产品性能】

插头-仪器插座、电极连接器-心电电极连接处的接触直流电阻都不应超过1.0欧姆。

【适用范围】

与监护仪、心电图机等配套使用，连接于仪器和电极之间，用于传递自人体体表采集到的电生理信号。不包括防除颤功能的提供。

【禁忌症】

皮肤有外伤或进行过外科手术并未愈合者禁止使用该产品。

【注意事项、警示】

1. 使用前应选择合适型号的心电导联线，检查配用仪器与此产品是否兼容，如不兼容，将无法使用；
2. 开封前应检查产品是否在有效期内；

3. 使用前检查产品是否有破损，如有破损，将影响信号采集功能；

4. 该产品只允许在医师或相关技术人员的指导下操作使用。

【使用说明】

1. 将心电导联线的仪器插头连接在心电监护仪器上，各导联线和主线缆标记相一致；

2. 对信号采集部位表皮进行清洁，消毒并干燥；

3. 将心电电极放置到信号采集部位；

4. 将导联线与心电电极连接，若产品为扣式导联线，需先将心电电极与导联线扣上后再将电极放置在信号采集部位处；

5. 连接完成后即可开始检测操作；

6. 用清水清洗、擦干备用。

It is used in conjunction with the patch electrode to detect ECG signal in ECG detection