

# 液体止鼾器贴牌 液体止鼾器OEM贴牌生产厂家

产品名称	液体止鼾器贴牌 液体止鼾器OEM贴牌生产厂家
公司名称	山西健康动力医疗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:复活草 型号:液体止鼾器 产地:山西
公司地址	北京市朝阳区银河sohoD座
联系电话	13121323687 13121323687

## 产品详情

【产品名称】液体止鼾器

【型号规格】

[10mL/瓶、18mL/瓶、30mL/瓶、40mL/瓶、60mL/瓶、80mL/瓶、100mL/瓶、150mL/瓶、200mL/瓶、250mL/瓶、500mL/瓶。](#)

【结构组成】该产品由喷雾瓶、喷嘴和喷雾液组成，喷雾液由聚山梨酯80、甘油、氯化钠、依地酸二钠、山梨酸钾和纯化水组成。

【作用机理】调理呼吸道组织，深层滋润咽喉、鼻腔部位，防止咽喉部位充血肿大，有效保持呼吸道湿润、润滑，促进气道通畅，使呼吸顺畅无阻。增加血红细胞氧含量,从而加强心肺功能，提高睡眠质量。

【适用范围】该产品适用于轻中度睡眠呼吸暂停综合征，通过润滑和软化鼻腔粘膜，保持粘膜湿润，降低上呼吸道阻力，以改善呼吸受阻状况，减轻或消除打鼾症状。

【产品性能】pH5.0~7.0，需氧菌总数 10<sup>2</sup> cfu/mL，霉菌和酵母菌总数 10<sup>1</sup> cfu/mL，大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌不得检出。

【使用方法】

- 1、取下卫生帽，首次使用朝上连喷排出空气。
- 2、鼻腔内使用：清洁鼻腔，人站立，双手按住产品两边对准鼻腔喷1-2次，每晚1-3次或视个人情况而定

3、口腔内使用：喷头朝上，直接喷于咽喉部与上颚。每次3-5次，保持口腔湿润，呼吸顺畅，每晚1-3次或视个人情况而定。

**【禁忌症】**

对本品成分过敏者禁用。

**【注意事项】**

- 1、本产品多次使用，开封后半个月内用完。
- 2、本品外用，置于儿童不宜接触处。
- 3、每次用后注意盖好保护盖，置于阴凉、干燥、清洁处。

**【有效期】** 二年

**【生产日期】** 见外包装

**【贮存】** 本品应密封，避光，置于干燥、通风处保存。

**【生产许可证编号】** 晋食药监械生产许20200012号

**【注册证编号】** 晋械注准20212140047

**【产品技术要求编号】** 晋械注准20212140047

**【生产企业及售后服务单位】** 山西健康之路医疗器械有限公司

**【住所】** 侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房

**【生产地址】** 侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房

曲沃县乐昌镇苏村东华街1号