

前列腺贴厂家 OEM贴牌 前列腺热敷贴贴牌生产厂家

产品名称	前列腺贴厂家 OEM贴牌 前列腺热敷贴贴牌生产厂家
公司名称	山西健康动力医疗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:复活草 型号:前列腺热敷贴 产地:山西
公司地址	北京市朝阳区银河sohoD座
联系电话	13121323687 13121323687

产品详情

【产品名称】前列腺热敷贴

【结构组成】该产品由无纺布、热熔胶、离型纸、磁片、发热袋（发热袋含有还原铁粉、活性炭、蛭石粉、盐、纯化水）组成。

【适用范围】该产品促进局部血液循环，辅助消炎、消肿。可用于慢性前列腺炎引起的尿频、尿急、尿痛、尿不尽，下腹部、腰骶部、会阴部疼痛不适等症状的辅助治疗。

【产品性能】采用传统医学透热疗法和磁疗原理，疏经通络，驱风散寒，改善患部血液循环。磁场强度为0.05T - 0.15T；40 以上的持续时间 4h（5h）；最高温度 60 。

【使用方法】

1. 外用，打开产品包装袋，取出前列腺热敷贴，揭去两翼内侧离型纸，将磁体部分（产品正中）对准中极穴（肚脐下4寸）或命门穴（背后正对肚脐）的贴身（棉、麻）衣物上。

2. 每天1个穴位，交替贴敷，每贴使用4-6小时。

3. 使用时，如感觉温度过高，可揭掉温控贴离型纸，将温控贴粘面贴于产品正中。

【禁忌症】

1. 皮肤破损、开放性伤口处、溃烂、急性闭合性损伤禁用；恶性肿瘤、出血倾向疾病患者、装有心脏起搏器者、体内植入金属者禁用；严重的心、肝、肺、肾衰竭者禁用。

2. 糖尿病人、精神病人、认知障碍者、过敏体质者慎用；、孕妇、儿童、体质极度虚弱者慎用；对磁疗有明显不良反应者慎用。

【注意事项】

1. 本品为一次性外用产品，开袋即热，不使用切勿开袋。

2. 对磁场敏感者如产生头晕、呕吐等晕磁现象，应立即停用，症状即可消失。

3. 用后患处出现不适或水泡，应暂停使用，防止感染，恢复后可继续使用。

4. 温控贴为选用品，初次使用或在新的部位使用本品时，请依照自身对温度高低的要求，决定是否使用温控贴。

5. 儿童需在成人监护下使用。

6.请勿在剧烈运动、睡眠中、取暖设备前使用，避免低温烫伤。

7.本品不能代替药品。

【储 存】应储存在通风干燥、无腐蚀性气体的室内。

【运 输】产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

【配件清单】前列腺热敷贴、说明书、温控贴。

【有效期】二年

【生产批号/生产日期/有效期至】见外盒

【生产许可证号】晋食药监械生产许20160009号

【产品注册证号】晋械注准20212090049

【产品技术要求编号】晋械注准20212090049

【注册及生产企业】山西健康动力医疗科技有限公司

【注册地址】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

【生产地址】侯马开发区东区工业园锦茂标准厂房1号厂房3层

山西省临汾市曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

【售后服务单位】山西健康动力医疗科技有限公司

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用。