

医用恒温箱（37℃）

产品名称	医用恒温箱（37℃）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	76344.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48℃ /0-100℃ 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用恒温箱（37℃）公司说明-

北京福意电器有限公司成立于1999年，是一家专业从事实验室、医疗设备、经营、销售及售后的高科技企业，为医疗，实验室，科研、化工，，检测等提供业、完善、高质量的产品及的、售后。公司力争以新、优、全的产品，让您的选择、使用、售后一气呵成！公司按现代公司制度规范公司行为，坚持“质量优良，用户至上”的原则，和“锐意创新，精益求精”的精神，用自己不懈的努力和智慧为客户提供高质量的产品。

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、腹透液加温箱。

医用恒温箱（37℃）用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用恒温箱（37℃）产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用恒温箱（37℃）相关-临床上对接受手术后出现低体温症状的患者实施术中冲洗液体加温干预措施的临床效果。方法:采取随机实验法,以我院收治的100例接受全身的患者为研究对象,随机均分为实验组和对照组,对对照组患者实施常规加温方法,对实验组患者实施术中冲洗液体加温方法,观察两组患者在接受护理干预后的临床恢复情况。结果:经过一定时间的护理干预后,实验组患者的苏醒时间、术后低温发生率、平均住院时间和术后切口感染率明显低于对照组,结果具有显著差异。结论:在临床上对接受手术后出现低温症状的患者实施术后冲洗液体加温方法,可以降低患者的苏醒时间、术后低温发生率、平均住院时间以及术后切口感染率,在临床上具有广泛的推广意义。医用恒温箱（37℃）

勤发发