

欧博 造口腹带预防疝气 结肠造口 造口腹带的作用

产品名称	欧博 造口腹带预防疝气 结肠造口 造口腹带的作用
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

欧博 造口腹带预防疝气 造口腹带的作用 造口腹带的使用方法

造口弹力腹带，广泛用于普外科手术后的包扎固定和妇产科产后恢复期。对腹部起束紧、支撑、固定作用；减轻局部水肿、疼痛，促进术后、产后康复。开腹手术，一般需在手术后的14天内用弹力腹带包裹腹部，和/ (或)根据需要在弹力腹带内侧加用布腹带，这是减轻切口张力、促进切口愈合的需要。此外，对消瘦或内脏器官有下垂症状者，腹带有对内脏起到举托的功效。

造口腹带使用方法：

选择合适的型号；

把造口袋从开口处拖出来；

把造口袋完整拖出使腹带从开口处压住造口袋底板；

两边用力拉一下，使腹带确保固定在腹部上、粘住。

造口腹带适用范围：

主要适用于造口患者佩戴在造口腹部上起到加固造口袋的承重和预防造口旁疝和疝气所配用的产品。手术初期即佩戴腹带的用户，可有效避免造口疝气的发生。从而延长造口袋使用时间，减少造口疝气带来的不便和痛苦。

造口腹带洗涤方法：

用热水或漂白剂清洗将会使产品减弱弹性；

产品应放在室外晾干，避免暴晒；

产品在投入洗衣机之前把开口与粘扣带粘上，用冷水或温水清洗均可。

造口腹带产品特点：

新型腹带的弹性设置可以适应不同体型的自由伸缩；经久耐用不易变形。

造口腹带作用：

造口弹力腹带主要用于结肠造口、回肠造口等肠造口术后初期患者，特别适合年老、消瘦、腹围肥的患者使用。它有效地降低了肠造口坏死和压疮的风险，使肠造口的护理更加安全高效；患者焦虑恐惧减轻，生存质量提高。