

# 欧博骨科牵引架 骨牵引下肢 抚顺布朗式架 牵引砣 牵引锤

产品名称	欧博骨科牵引架 骨牵引下肢 抚顺布朗式架 牵引砣 牵引锤
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

## 产品详情

### 欧博骨科牵引架 骨牵引下肢 抚顺布朗式架 牵引砣 牵引锤

由于传统布朗式牵引装置的牵引位置固定、牵引范围局限，易引起患肢疼痛、压疮，牵引效果往往不佳。经改良后的布朗式牵引装置，主杆和2个平行架为空心套实心的钢管及可调节螺丝制成，再配主杆两侧安装高、中、低3个层次的弧形可活动弓型装置，可以根据患者年龄、肢体长度随意调节高度及长度，保持患肢牵引时与床呈30°角，并外展30°，确保牵引效果，并可提高患者的舒适度。本研究结果显示，牵引调理3周后，试验组压疮、骨筋膜室综合征的发生率低于对照组，牵引舒适度及骨折复位效果优于对照组(均P<0.05)，说明改良布朗式牵引装置较传统布朗式牵引装置骨折复位效果更佳，且患者舒适度更好。

### 欧博骨科牵引架 骨牵引下肢 抚顺布朗式架 牵引砣 牵引锤

骨牵引是调理下肢骨折常用的一种方法。由于骨牵引调理时间长，其并发症发生率较高。目前临床上使用的传统布朗式牵引装置的高低及长短均不可调节，这使得不同年龄、身高和体质量的患者在行骨牵引时出现体位不吻合，导致患肢疼痛，影响骨牵引调理的效果。新型布朗式架，提高了可调节性和舒适性，应用于临床取得了良好效果。

### 欧博骨科牵引架 骨牵引下肢 抚顺布朗式架 牵引砣 牵引锤

#### 使用注意事项：

- 1)使用改良式布朗式牵引装置后，应定时巡视患者，密切观察伤肢病情变化，保持有效牵引体位；
- 2)定期测量患肢长度，并与健肢对比，以防过度牵引；

3)积极消除不利于骨折恢复的原因，预防并发症的发生。

骨牵引是调理下肢骨折常用的一种方法。由于骨牵引调理时间长，其并发症发生率较高。目前临床上使用的传统布朗式牵引装置的高低及长短均不可调节，这使得不同年龄、身高和体质量的患者在行骨牵引时出现体位不吻合，导致患肢疼痛，影响骨牵引调理的效果。新型布朗式架，提高了可调节性和舒适性，应用于临床取得了良好效果。