

# 医用透明质酸钠修护贴贴牌生产厂家 医用面膜OEM贴牌 广审批文

产品名称	医用透明质酸钠修护贴贴牌生产厂家 医用面膜OEM贴牌 广审批文
公司名称	山西健康动力医疗科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:素美颜 型号:医用透明质酸钠修护贴 产地:山西
公司地址	北京市朝阳区银河sohoD座
联系电话	13121323687 13121323687

## 产品详情

【产品名称】医用透明质酸钠修护贴

【型号、规格】面部型：22cm × 21cm、23cm × 20cm；眼贴型：175mm × 70mm、185mm × 70mm、58mm × 70mm。

【结构及组成】该产品由透明质酸钠、海藻糖、甘油、卡波姆、黄原胶、丁二醇、三乙醇胺、纯化水和无纺布组成。内包装材料为聚乙烯袋。产品经辐照灭菌，无菌供应。

【适用范围】该产品适用于非慢性创面（浅表性创面、手术后缝合创面、小伤口、擦伤、切割伤创面、I度或浅II度烧烫伤创面、激光/光子/果酸换肤/微整形术后创面）及周围皮肤的护理，为创面愈合提供微环境。

【产品性能】pH值范围为4.5-6.5；重金属含量（以Pb<sup>2+</sup>计）应不大于10 μg/g。产品应无菌。

【使用方法】清洁创面后，打开本品外包装，取出医用透明质酸钠修护贴展开，敷于创面皮肤上，轻压敷于患处。

【禁忌症】对外用透明质酸钠制品，以及本品成分过敏者禁用。

【注意事项】

- 1.本品为一次性外用品，禁止内服，不使用切勿打开。
- 2.置于儿童不易触及到的地方。

- 3.液体如果不慎入眼，请用大量清水冲洗。
- 4.如用后患处感觉不适，应暂停使用。
- 5.本品性状发生改变时禁止使用。
- 6.使用前请阅读说明书，在产品有效期内使用，超过有效期禁止使用。
- 7.使用前确认包装是否完整，如遇破损，切勿使用。
- 8.本品极少发生过敏反应，一旦出现过敏反应，应停用本品。

【有效期】二年

【生产日期/生产批号】见外包装

【贮存】常温储存，避免阳光直射。

【运输】产品在运输过程中应避免日晒、雨淋及重压。

【配件清单】医用透明质酸钠修护贴、说明书

【生产许可证编号】晋药监械生产许20200012号

【注册证编号】晋械注准20232140091

【产品技术要求编号】晋械注准20232140091

【注册人名称/生产企业】山西健康之路医疗器械有限公司

【注册人住所/生产企业住所】侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房

【生产地址】侯马经济开发区科技创新孵化园标准厂房1栋厂房，曲沃县乐昌镇苏村东华街1号

请仔细阅读产品说明书并在医务人员的指导下购买和使用