

# 广东犬咬伤冲洗设备-犬咬伤消毒液

产品名称	广东犬咬伤冲洗设备-犬咬伤消毒液
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/袋
规格参数	脉动压力冲洗:56kp安全水压
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

广东犬咬伤冲洗设备-犬咬伤消毒液一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。整个冲洗过程中水温、水压、犬清TM 消毒液与清水的交替、生理盐水的冲洗以及结束时的小票打印等都是全自动完成，无需做其他任何操作！针对重伤患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，人员可根据情况选择冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，J大降低医护人员工作负担）。

1、犬伤清创机取得《中华人民共和国医疗器械注册证》，号：2、符合卫生部《狂犬病暴露预防处置工作规范》，符合CDC《狂犬病预防控制技术指南》要求3、冲洗报告、自动记录、打印并签字确认，严格避免医疗事故，杜绝医患纠纷！

1、一键自动冲洗、清单自动打印，记录自动保存、统计，枪柄无线控制压力，解放门诊人力物力

2、带快捷接口的《犬清》冲洗消毒液+《犬清

》消毒喷剂，免去配皂液、涂碘伏等繁琐的流程，安全又高效！

3推车式设计，自由移动，不受使用场景、环境、场地的限制

广东犬咬伤冲洗设备-犬咬伤消毒液

全自动控制系统：整套控制系统以国家规范为框架，以伤患的安全为目标，同过的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。整个冲洗过程中水温、水压、犬清TM 消毒液与清水的交替、生理盐水的冲洗以及结束时的小票打印等都是全自动完成，无需做其他任何操作！针对重伤患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，人员可根据情况选择冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，J大降低医护人员工作负担）。

高频脉动灌冲：压力水柱结合间歇性的大量水泡瞬间爆裂的冲击，共同作用在冲洗创面，使创口组织规律的收缩舒张，可使创面缝隙中的破碎组织、杂质、病毒、细菌被翻动冲出，同时显著降低患者疼痛阈值，不破坏健康组织，冲洗工作安全高效。注：脉动压力压强56kPa,频率每分钟900~1800次，安全快速，不会造成清创部位组织水肿

多功能冲洗枪：同时枪头手柄带无线控制开关，枪不离手随时调节水压。为了针对不同类的创口，特别研制了多种场景的特制枪头，以保障犬伤清

广东犬咬伤冲洗设备犬咬伤消毒液

创冲洗的安全高效。例如针对大面积撕裂伤特有扇面枪头；针对开口小，创伤深的伤口有

精细枪头可对深创面做彻底灌注冲洗等。犬清 弱碱性清洗消毒剂：含有二癸基二甲基氯化铵、葡萄糖酸氯己定、表面活性成分等，高效杀毒，无刺激、8小时长效抑菌同时促进伤口快速愈合，有效降低犬伤并发感染和继发细菌感染率