

# 智象牌粒针耳穴贴王不留行籽贴耳豆贴王不留型耳贴按摩贴耳穴位按

产品名称	智象牌粒针耳穴贴王不留行籽贴耳豆贴王不留型耳贴按摩贴耳穴位按
公司名称	扬州市智象医疗用品有限公司
价格	15.00/盒
规格参数	品牌:智象 材质:王不留行籽 规格:100PCS
公司地址	扬州市邗江区峰创国际大厦1-604（注册地址）
联系电话	13773524182

## 产品详情

### 产品介绍：

智象王不留行穴位压力刺激贴属于一类医疗器械产品，由球体状定向王不留行和3M胶带组成。智象王不留行贴选用球体状王不留行籽，颗粒坚硬、大小均匀。通过中医穴位原理，将产品贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。对一些疾病起作用的辅助疗效作用。可以针刀针灸埋线等疗法相结合，通过刺激不同的穴位，可以激发人的经络之气，以达到通经活络、调整人的机能、祛邪扶正的目的

### 产品使用说明书

医疗器械生产备案凭证：苏扬食药监械生产备20210009号

医疗器械备案凭证编号：苏扬械备20210087号

产品技术要求编号：苏扬械备20210087号

【产品名称】穴位压力刺激贴-智象王不留行贴

【规格型号】100PCS

【产品性能及结构】通常由球状体和医用胶布组成。贴于人体穴位处，通过外力仅起压力刺激作用。

【适用范围】贴于人体穴位处，进行外力刺激。无创。

## 【使用说明】

使用本品前，应先清洁消毒刺激部位。将手擦洗干净,打开外包装，撕开胶布，将穴位压力刺激贴对准部位，进行黏贴，并固定位置，再按周边部位以达到牢固粘贴，方便安全。并要时常按压所贴之处，有利于穴位刺激。为保持卫生，夏天1 - 2天需要更换，冬天3 - 5天为宜；休息两天再贴。

## 【注意事项、禁忌症】

- 1：本品一次性使用，启封即用。
- 2：本品为非灭菌产品。使用前，请先清洁和消毒刺激部位。
- 3：过敏反应，停止使用。
- 4：避光、密封，常温处保存。

## 【存储及使用环境】

预期使用环境：医院、医疗/临床实验室、救护车、家庭、中医养生馆、美容院等。穴位压力刺激贴使用环境：湿度不超过80%，干燥，无腐蚀性气体环境中。

【备案人/生产企业名称】扬州市智象医疗科技有限公司

【备案人/生产企业住所】仪征经济开发区锦华路6号9栋102、202、302

【生产企业生产地址】仪征经济开发区锦华路6号9栋102、202、302

【售后服务单位】扬州市智象医疗科技有限公司