

# 医用高压脉冲机-医用清创仪

产品名称	医用高压脉冲机-医用清创仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	脉动压力冲洗:56kp安全水压
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

产品特点创新技术优势·快捷、安全、方便的操作系统：打开电源开关直接进入工作状态，无需等待，直接工作。·双核设计：负压吸引和脉动压力清创可同时使用，互不影响。极大的解决了不同类创面清创的等待时间。·负压回收、液位探测、液位报警、液位自锁功能，杜绝废液溢出。·清创过程中不会损伤伤口周围的神经和肌肉组织，对正常组织以及新生肉芽组织无损伤无任何副作用。·能激活纤维细胞，促进纤维蛋白层的合成，改善伤口环境，促进伤口愈合。·清创时根据伤口面的深浅，适当调整枪头与伤口清创面的距离，可达到普通清创器械不能到达的部位，实现彻底清创。·压力清创适合各种大面积创伤、急救、及各种术前、术后的清创，清创迅速、清洗彻底、视野清晰、从而提高手术质量，赢得抢救时间。用途和使用范围：·各类外伤、大面积创伤、烧伤、车祸伤、开放性骨折等。·骨科手术、关节置换、胸腹腔手术等可实现冲吸结合的冲洗效果。

治疗机理快速压力清创将产生出脉冲击力水，使创伤组织表面在收缩和舒张之间有规律的反复交替出现，冲洗液中的水流气泡破裂产生的推力，将使夹杂在创面的污染物松动地被水流带走。通过冲洗液的多种物理联合作用可达到清除创面的异物，这种清创主要用于大面积开放性创伤。使用中冲洗枪的脉动压力水流在医务人员的操作下可以从任意角度针对性地冲洗创面，大大提高清创的速度和洁净度。废液回收通过负压吸引，可边清创边回收清创废液，避免污染扩散使工作环境保持清洁。这种冲洗方法明显优于传统的创面处理方式，大大减少借助纱布擦拭的次数、减轻患者的痛苦，大面积冲洗速度快捷、方便、清创时间缩短，深度伤口也可得到清除，避免发生二次污染，固体杂物和液体污染一同被清除，冲洗后的污水容易回收、便于集中处理。

适用科室创伤外科、骨外科、烧伤科、内分泌科、急诊外科、乳腺外科、普外科、肛肠科、手足外科、血管外科、皮肤性病科、康复理疗科、手术室、换药室等。