

批发供应竹制二孔灸架/两孔艾灸盒/温灸器jm-39

产品名称	批发供应竹制二孔灸架/两孔艾灸盒/温灸器jm-39
公司名称	江门市蓬江区中康医疗器械商行
价格	10.00/件
规格参数	产品类别:温灸器 品牌:中康 货号:jm-39
公司地址	中国广东 江门市 江门中心医院
联系电话	86-07503378884 13702281525

产品详情

产品类别	温灸器	品牌	中康
货号	jm-39	产地	广东江门
加印LOGO	可以	是否提供加工定制	是
材质	竹筒	类型	家庭式
孔数	2-3孔	形状	圆形

配件:松紧带一条

竹制二孔灸架使用说明：

- 1、顶管：适用于粗细不同的艾条,调整就和顶盖上的夹子即可。
- 2、盒架：是灸架的主体，既便于清除灰烬又利于通风燃烧。
- 3、防护网：位于底部，是为了防止艾火脱落烫伤皮肤所设的隔离层。
- 4、底袪：用以勾住橡皮带，将艾灸架固定在灸处用。位于架子底部两侧。
- 5、橡皮带：套住底袪，固定支架用。

五大优点

一、不需手持和砂袋夹持在人身各个部位均可固定，避免医者和患者长时间手持操作的负担和熏灸时患者必须卧床治疗限制自由的缺陷。二、热力均衡不受气候、环境的影响，可以较长时间连续地给患者

以舒适温热的刺激，保温性能良好，艾火在盒内能充分燃烧，不会中途窒息。三、调节随意艾条点燃后，由不锈钢簧片夹持，通过透视孔可以随时掌握艾条燃烧情况，上下移动以调节适合的温度。四、使用安全艾条插入盒内，火头空悬盒中，底端有金属丝网遮挡，周边有阻燃材料挡护。五、运用广泛一盒可同时灸治多穴，对膝关节骨质增生、肩周炎、腰椎病及病变部位等尤为适宜。

使用说明选定部位，将艾条点燃后插入顶管中（内有不锈钢弹簧片夹持），上下移动，以调节适合的温度。多孔灸盒还可以根据临床需要增减火头或按相应的孔穴插入艾条，使用无烟灸条可采用小单孔灸盒，调节温度时，应将盒体倾斜，调节后，再将盒体放正，以避免火星直接透过金属网。为了能了解到艾火在盒内燃烧情况，特在盒体前后增设了若干个透视孔，使用时可以随时观察。当艾火烧近盖口时，应及时将艾条向下插送，以防损坏部件。灸治完毕，将剩余艾条插入灭火管中，待下次再使用，排除盒内灰烬时，将盒体倒置，用手轻弹，灰烬便可以从两边的透气孔中排出。

1顶管：适用于粗细不同的艾条（不要随意旋转）。

2、盒架：是灸架的主体，既便于清除灰烬又利于通风燃烧。

3、防护网：位于底部，是为了防止艾火脱落烫伤皮肤所设的隔离层。

4、底袷：用以勾住橡皮带，将艾灸架固定在灸处用。位于架子底部两侧。

5、橡皮带：套住底袷，固定支架用。

使用说明：

1、将艾条点燃后插入顶管，以上下自由移动为准。

2、选好部位，将双股橡皮带系在要熏的部位上，然后将艾架罩在上面，将橡皮带套在灸架两边的底袷上，即可附贴牢固而不脱落。

3、升降艾条调节火力，以微烫而不疼痛为适中，火力过小，效果不佳。

、经常吹去或弹掉艾条上的灰烬，并保持艾灸架的清洁。