

# 批发供应经络拍/引痧条/拍痧棒/拍痧条引痧棒/经络

产品名称	批发供应经络拍/引痧条/拍痧棒/拍痧条引痧棒/经络
公司名称	江门市蓬江区中康医疗器械商行
价格	42.00/件
规格参数	产品类别:按摩棒/按摩锤 品牌:中康 材质:a
公司地址	中国 广东 江门市 江门中心医院
联系电话	86-07503378884 13702281525

## 产品详情

产品类别	按摩棒/按摩锤	品牌	中康
材质	a	按摩部位	其他
动力模式	手动	适用场合	家庭、其他
产地	广东江门		

规格:

全长30cm，重量120g（素材加入精细研磨的电气石粉末，持续释放远红外线以加速血液循环）

功效：

1. 出痧功效迅速 (diy 自疗)
2. 促进血液循环 (消除疲劳)

3. 活化全身细胞 ( 延缓老化 )
4. 按摩内脏 , 蠕动胃肠 ( 局部瘦身减肥 )
5. 刺激末梢及反射神经 ( 代替脚底按摩 )
6. 增强免疫系统 ( 保健身心 )

经络复康拍/引痧条是从挑选合适弹性的素材开始、设计易于操作持握的手把、到重复性实验为止 , 经三年间不断地试验、改良才完成的最佳自疗器具 , 并经过严格质量管理的层层把关 , 才得以进入国际市场成为代表中华传统民俗自疗 ( diy 自行治疗 ) 的自我保养工具 , 品管严谨近乎吹毛求疵 , 购买拍打产品皆终生保固。引痧条与过往拍痧产品最大的不同在于引痧条能使凝血块快速的膨胀 , 在出痧的效果上不仅较拍痧产品快速 ( 目前试行平均约在 7~8 倍之间 ) 且更加深入 , 用于不易出痧的部位 ; 如肩胛骨旁膏肓穴之类韧带与肌肉发达处 , 出痧效率有更加明显地改善。而且使用起来毫不费力 , 只要稍经练习掌握诀窍 , 谁都可以轻轻松松地完成引痧的专业治疗效果。但在使用上 , 引痧条较拍痧棒有更多需要注意的地方 , 使用前请详阅使用说明。

注意事项 :

运用此引痧条请掌控好力度,不能用力过大以免产生瘀血等症状.或对拍痧棒产生破坏!

孕妇、妇女经期、饭后一小时内禁拍

五多打1.固定点如肚脐 ( 神关 )。2.关节处如肩膀、臑部。3.内筋就如膝后方 , 肘前方。4.经络处如督脉 , 任脉。5.气血不通之处。五不打

1.吃饱、喝醉不宜打。2.突出关节不直打 , 如膝头 , 肘尖 , 踝尖。3.新伤尤其瘀血、流血或骨折等。4.后腰肾脏、眼窝、后脑勺等脆弱部位不打。5.外伤之肿胀半消亦不可打。