

实木脐疗温灸器/jm-05木脐疗器/艾灸器/艾

产品名称	实木脐疗温灸器/jm-05木脐疗器/艾灸器/艾
公司名称	江门市蓬江区中康医疗器械商行
价格	18.00/件
规格参数	产品类别:温灸器 品牌:中康牌 货号:jm-05Ajm-05B
公司地址	中国 广东 江门市 江门中心医院
联系电话	86-07503378884 13702281525

产品详情

产品类别	温灸器	品牌	中康牌
货号	jm-05A jm-05B	产地	广东江门
加印LOGO	可以	是否提供加工定制	是
材质	木质	类型	家庭式
孔数	7孔及以上	形状	圆形

本店的木脐疗器都是用实木（荷木）制作的！不是市面上的那种杂木制作！所以价格相比较是要贵的！本店的质量问题是绝对的好【使用方法】：1、清洁腹部肌肤，去角质后美容师用保养精油或特定疗效精油进行腹部按摩。2、将香薰脐疗工具安装好，把黄玉放在肚脐上，脐疗工具放于玉上，然后将点燃的脐疗艾条一头放入脐疗器内。3、当艾条燃烧完后，取出艾条用脐疗工具的另一头熄灭或用水熄灭，然后用热毛巾清洁皮肤，涂抹护肤乳液。4、喝杯温热花茶，平衡身体水分及湿度。5、在使用过程中配合中药粉或姜片效果会更好。

注意：此款灸器为木质,每次使用时间不宜过长,宜在30分钟以内。不能用艾绒，如果选用无烟艾条，每次不宜超过10分钟，因为无烟艾条温度高，容易烧坏木制。

友情提示：艾条在每次燃烧3 - 4分钟后，请调节艾条的高度即将艾条向下压些，一可保持温度，二可免长时间燃烧圈孔将其的铁圈和木质材料连接处的胶烧坏，造成不必要的损失。