

海尔腕式语音全自动电子血压计FTA11

产品名称	海尔腕式语音全自动电子血压计FTA11
公司名称	青岛奥美礼品有限公司
价格	462.00/台
规格参数	装箱数:40(台) 品牌:海尔 型号:FTA11
公司地址	青岛市市南区宁夏路268号乙一楼.
联系电话	0532-85766022 053289688111

产品详情

装箱数	40(台)	品牌	海尔
型号	FTA11	产品类别	家用血压计

海尔血压计总代-青岛奥美礼品有限公司

欢迎各礼品公司 医药公司 批量供应 超低价格

外观说明精致小巧携带方便

卖点提炼海尔品牌携带方便性价比高针对高血压患病及隐形族人群完善的售后保障商品卖点1、海尔品牌(国内知名品牌可信度高)

2、优越的产品性能

3、品质保证(通过三大权威认证:英国高血压联盟bhs a/a级认证、德国高血压联盟gs认证、美国医疗仪器促进协会aami认证)

4、性价比优(大屏幕液晶显示,一键式操作,方便简单,高压、低压和脉搏同步测量、显示。

5、完善的售后服务保证(两年内保修 终身维护
全国统一免费咨询电话:800-8600-729)市面上大部分电子血压计只能提供 一年内保修.

6、未雨绸缪(经常测量血压,是控制高血压预防心脑血管疾病的有效措施)

7.市面上操作最简单的腕式全自动电子血压计特
点市面上操作最简单的腕式电子血压计,一键式操作,携带方便。功能说明1、自动加压

- 2、超大屏幕液晶显示
- 3、弧线形设计、美观大方
- 4、单键式开、关，大型按钮，操作简单
- 5、自动存储当前测量结果
- 6、测量过程中伴有脉搏提示音
- 7、测量结果以mmhg单位显示
- 8、同屏显示血压值和脉搏数使用方法手心向上，把电子血压计绑在手腕的内侧，手腕带绑于离手腕关节1厘米处。腕带不能捆绑太紧，也不能太松，以手腕舒适为宜。使机器中心点与心脏保持同一水平位置。按下开关键，一键式操作简单方便。使用注意事项使用时一定要注意把手腕带捆绑正确，位置放置正确，以保证测得准确血压。另外，测量者一定要在心情轻松的状态下，测量时不要说话，不要动。