

冷疗机-针对患者局部进行冷、热敷压力治疗，减少出血，消除肿胀，缓解疼痛！

产品名称	冷疗机-针对患者局部进行冷、热敷压力治疗，减少出血，消除肿胀，缓解疼痛！
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

产品详情

结构与组成:该产品主要由硬件（冷热敷机主机、电源线、保温软管、水囊、排水管）和软件组成。

工作模式:冷敷、热敷、常压、脉动加压、计时和计次多种模式可以分别单独工作，也可以任意组合真正实现一机多用。

核心技术:航天级半导体制冷模块，体积小、噪音小、免维护、环保安全。

脉动压力:具有缓解局部压力、促进静脉回流，预防静脉血栓、促进血液循环功能。脉动加压和常压可任意切换。

智能提示:具有各种状态、液位检测、温度超限、过载、过压、超温、缺水及其它故障自动提示功能。方便使用和维护

品牌:其他

类:冰囊

号:-100

冷敷部位:关节部位

制冷方法:半导体

材质:塑胶

规格尺寸:400*292*292

重量:10kg

骨科外伤或手术后软组织损伤、炎症反应及其对预后的影响已日益受到关注.如何控制软组织损伤程度的加重及过度炎症反应的发生,以减少并发症并提高预后,成为骨科临床的一项重要任务.局部冷疗作为控制软组织损伤及炎症反应的有效治疗方式,可有效缓解肿胀和疼痛,明显提前施行手术治疗,减少相关并发症,并可减轻患者经济负担及护理人员工作量;与其他治疗方式相比,具有不良反应少、成本低、操作方便、医从性高等优势,在临床得到广泛应用冷敷机——黑科技时代到来一分钟迅速制冷半导体技术降温,降温速度快,操作方便快捷,温度,时间,使用次数及脉动压力可以调控,设有超低温,超高温温度保护,可达成恒温效果,避免了在使用过程中对患者造成二次伤害,公司配备的冰囊适用于身体各部位,降温效果显著。产品名称:冷敷机产品号:-100产品号:1.对患者局部进行冷、热敷压力治疗,减少出血,消除肿胀,缓解疼痛。2.采用全自动半导体电子制温系统,功耗低,降温迅速一分钟迅速制冷。3.全自动一键式操作,具有自动记忆和识别初次治疗模式。4.冷敷和热敷温度范围:冷敷:6 -15 ,热敷:38 -50 。5.制温速率: 3 /min。6.工作时间: 99h,工作次数1-10次。7.水囊材质高强度聚氨酯TPU蜂窝,由两层软质防水材料复合而成。身体各部位水囊便于治疗。8.输入功率120VA、噪音 55dB。冷敷的作用本机其冷敷治疗可以使局部血管收缩,血液流速减缓,并使毛细血管的渗透性降低,组织液外渗减少,局部代谢减缓,同时有效地减少了炎性介质的释放。可降低局部组织温度、收缩血管、减少皮下出血、减轻组织肿胀,同时降低神经末梢的兴奋度、提高疼痛阈值从而达到降温止痛止渗的作用。可对各种外伤,软组织损伤,术前术后的肿胀、水肿浮肿,关节积血、积液,关节炎,急慢性软组织损伤,肌肉损伤,闭合性四肢及关节术后的神经疼痛,急慢性软组织疼痛等有明显的改善效果。对于骨科和外伤造成的肢体肿胀在24-48小时内采用加压冷敷治疗已经被证明是安全有效的手段。“ ”脉动加压冷热敷机替代了所有冰敷的传统治疗方法,使用纯物理疗法,操作方便、效果显著;产品选用气压、专护水囊,适应身体各个部位使用,给患者带来意想不到的治果。热敷的作用