

“全自动脉动加压冷热敷机”——操作指南

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | “全自动脉动加压冷热敷机”——操作指南 |
| 公司名称 | 河南煜博医疗器械制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东 |
| 联系电话 | 17334889399 17334889399 |

产品详情

医疗“全自动脉动加压冷热敷机”是一种全新的冷敷、热敷、加压相结合，对损伤组织局部冷敷、热敷可消肿、止痛、止渗、降温等作用的一种医疗设备。：采用全自动半导体制温系统，制温速度快、免维护、对环境无污染。操作简单，准备时间短，减轻医护人员工作强度。俩大专利：半导体制冷 脉动循环加压功能强大：冷敷

热敷 脉动、加压于一体可用于：各种外伤、骨伤、发热、发烧、疼痛肿胀等患者；骨科、康复科、疼痛科、中医理疗科、儿科、医学美容科、运动创伤科等多个科室。骨关节手术后或骨伤后的急性期，有极好的止痛消肿效果，在手术或者外伤48小时后使用热敷加快血液循环，促进炎性物质消散，减轻疼痛加速愈合，热敷还可以促进药物透皮吸收，代替蜡疗，使用方便灵活

“全自动脉动加压冷热敷机”操作指南如下：

检查设备状态和通电，确认水箱水位高于中水位标识。

选用合适水囊，用保温软管连接至主机。

检查冷热开关位置，确认治疗参数，绑缚水囊至患部动按键开始治疗。临床患者止疼消肿，立竿见影，切换冷热敷选择开关要先关闭电源，水囊材质柔软轻拿轻放，避免针刺。

医疗“全自动脉动加压冷热敷机”七大优势：

- 1、制冷速度快一分钟迅速制冷，全自动恒温。
- 2、电子制冷无机械摩擦和损耗，可长时间连续工作不停机。
- 3、不用制冷媒，环保无污染，体积小，噪音低。
- 4、脉动循环加压，避免长时间冷敷形成静脉血栓。
- 5、自动化程度高，性能稳定免维护。
- 6、功能强大，冷敷热敷脉动加压力于一体。
- 7、适用范围广，各种外伤、骨伤、疼痛肿胀、发烧发热患者均可使用。

结语：

医疗全自动脉动加压冷热敷机自推出以来经受住了医院临床应用的种种考验，产品在市场及医院临床都深受好评，这无疑给了我们一剂强心剂，让我们更加专心的致力于提供高品质产品，为提高医院诊疗水平做出我们应有的贡献。

与同行，与世界同步！不忘初心，砥砺前行，你我携手，必将引领起这场变革的潮流，营造未来，共创财富。