

约束手套使用说明 开口约束手套生产定做

产品名称	约束手套使用说明 开口约束手套生产定做
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:均码 型号:约束手套 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

约束手套又可以叫波板手套、防拔管手套，是临床护理中使用的较多的一款防拔管护理用具，约束手套的用途是预防非计划性拔出治疗性管道，避免抓伤皮肤。约束手套材质分为网状的和棉质的，型号也区分了成人和儿童，这就在一定程度上方便了不同群体的需求。那么使用约束手套时应该注意些什么呢？

首先，请勿将本产品放置于湿度50 以上的环境中

其次，严格避免与锋利、尖锐的物体及腐蚀性溶液接触

然后，为避免交叉感染，不可在病人间交叉使用，并定期进行清洁

试用前检查各个部位，若有破损请停止使用。

约束固定手套（开口型）『产品规格』：均码，特殊规格可加工定做『性能特点』：约束带是一种保护病人的装置，用于躁动病人有自伤或坠床的危险，防止病人抓伤自己或拔掉输液

器等危险动作，用于需要固定身体某一部分时，限制其身体及肢体的活动。

『适用范围』：安置和约束躁动或不合作病人，并能防止意外发生。『使用方法』：将约束手套戴在患者手上，魔术贴粘固定手腕，松紧以病人手脚脱不出为准，里面装入一块塑料板，

有效地防止患者抓伤自己和医护人员，带子另一头固定在病床床头上。

本产品手指部位做了开口设计，方便病人采血