

医用恒温箱280L 2-48 恒温箱FYL-YS-280L

产品名称	医用恒温箱280L 2-48 恒温箱FYL-YS-280L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	71933.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用恒温箱280L 2-48 恒温箱FYL-YS-280L公司说明-

北京福意电器有限公司坚持以质量求生存，以科技求发展的管理思路，结合现代化企业管理模式，发挥企业独特优势，不断推出顺应市场的恒温冷藏设备。公司怀着高起点，创品牌，化的坚定信念，以其高精、合理，真诚的售后，与广泛企业携手并进，迈向未来。业经营：医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、-20 冰箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、运输保温箱等。

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、腹透液加温箱。

医用恒温箱280L 2-48 恒温箱FYL-YS-280L用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用恒温箱280L 2-48 恒温箱FYL-YS-280L产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品

的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用恒温箱280L 2-48 恒温箱FYL-YS-280L相关-低体温危险因素

1.4.1手术间温度病人进入手术间前30分钟，将手术间温度调25~27℃。1.4.2覆盖物 患者送入手术室后，对患者加盖毛毯，减少身体皮肤暴露。对于年龄大，基础疾病多的患者可以采用双层或多层覆盖。对不施手术部位用保暖性能好的被服遮盖，避免弄湿被服，保持手术床干燥，1.4.3手术野皮肤消毒 手术野皮肤消毒时，尽量缩短暴露时间。手术视野周围皮肤采用粘贴巾覆盖，减少汗腺水份的蒸发。此外可以采取Betadine消毒液替代挥发性的消毒液。1.4.4静脉输液及手术野冲洗 使用加温后的液体对患者进行静脉输注，加热方式可以采取水浴箱加热。使用大量生理盐水冲洗手术野，会腹腔脏器体温丢失过多，引起体温下降。

1.5 保温护理措施 1.5.1调节手术间温度 在病人进入手术间前30分钟，将手术间温度调22~24℃，湿度40%~60%。有学者认为手术室环境温度直接全麻病人的核心温度，温度调节在22℃左右，能有效延缓病人体温下降。柯丹等发现将室温提高可以缓解病人体表温度的下降。1.5.2覆盖物 研究[5]指出单层覆盖物即能降低人体30%的散热量，术中在非手术区域的四肢和躯干用暖棉被等覆盖以减少散热。

1.5.3静脉输液体 研究认为将液体加温37℃预防低温引起的肢体发凉、寒冷。1.5.4加强体核温度监测患者接受全身后，体温调节收到抑制，造成机体体表温度与核心温度出现偏差。护士应该加强对核心温度的监测，如测定直肠温度来确定患者是否发生低体温。1.5.5充气保温疗法 采用充气式充气毯，对人体背部、臀部，大腿，小腿进行保温。医用恒温箱280L 2-48 恒温箱FYL-YS-280L