

显微镜用红宝石精子计数板

产品名称	显微镜用红宝石精子计数板
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:荣兴 型号:WL 产地:中国
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

产品详情

显微镜用红宝石精子计数板

显微镜用红宝石精子计数板

红宝石精子计数板由一个特别设计的标准载玻片与盖玻片组成。精子计数板用于未稀释标本的精子计数。载玻片由一个计数池组成，计数池的深度均为0.01mm。这个优化的深度形成的单层精子细胞，使精子的运动不受阻碍，存活率能被评估，并且易于进行精子计数。

【详细说明】

一、精子计数板介绍

所生产的近3000套精子计数板的质量检测档案都有留存，每块出厂前都检测过，可以接受任何质检部门的检测，不符合要求的免费调换。所售精子计数板承诺保修一年。

二、用途makler精子计数板主要用于精子计数及形态分析；以及前列腺液、宫颈分泌液、血球细胞计量检验等。

三、使用方法1.基座板上 6.5mm处为体液载放台。使用医用酒精清洗消毒后，即可使用。

2.将被检精液滴于圆形载液台上，合上环形盖板。置于显微镜平台上即可观察计数。

3.在显微镜目镜系统接入数码摄像机与电脑连接，即可应用分析软件进行计数或形态分析。

四、技术参数1.外形尺寸：74×36×7（板加盖总厚度），单位：mm。

2.载液平台（6.5mm）与盖板之间的间隙10μ（0.01mm），精度误差：在37℃恒温状态下为±1.5μ。

3.网格尺寸：0.1×0.1=0.01每小格。

注意事项1.本产品为精密检验工具，主体为光学玻璃、红宝石组合制品。轻拿轻放，不能碰撞。

2.不能用硬物在圆形载液台上擦拭。

3.禁止用40℃以上热水冲洗浸泡，严禁用强酸、强碱液擦洗。

4.使用完毕，请用医药酒精清洗后放入盒内。