

犬咬伤冲洗设备-犬伤冲洗器

产品名称	犬咬伤冲洗设备-犬伤冲洗器
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

犬咬伤冲洗设备--犬伤冲洗器适用于各种犬咬伤清洗清创、动物咬伤抓伤清洗清创等，利用肥皂水（弱碱性溶液）加生理盐水即可清理，56KPa的脉冲压力，每分钟800-1800次的脉冲频率，可以快速有效清除创面杂物、污渍、唾液等。降低伤口内细菌和病毒含量，预防狂犬病。

伤口冲洗的重要性：

被动物咬伤而感染病毒，病毒在伤口周围肌肉组织中复制，狂犬病毒通常在伤口周围肌肉组织停留至少72小时，长可达两周以上才能进入末梢神经。此阶段伤口清洗尤为重要，目的是降低伤口内的病毒和细菌含量，是我们降低狂犬病发病率的一个关键措施。

狂犬病暴露后处置两个目标:

一预防狂犬病的发生;

二预防伤口发生继 发细菌感染，促进伤口愈合和功能恢复。

伤口处理:

伤口处理包括对伤口内部进行彻底的冲洗、消毒以及后续的外科处置，这对于预防狂犬病发生，避免继发细菌感染具有重要意义。

伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许,建议使用狂犬病清洗设备和清洗剂对伤口内部进行冲洗。然后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残留。

消毒处理:彻底冲洗后用稀碘伏(0.025 %-0.05 %)、苯扎氯铵(0.005 %-0.01 %)或其他病毒灭活效力的皮肤粘膜消毒剂消毒涂擦或者消毒伤口内部。

----以上资料出自狂犬病预防控制技术指南(2016版)