

## 玻瓶注射液加温柜FYL-YS-431L

产品名称	玻瓶注射液加温柜FYL-YS-431L
公司名称	北京福意联医疗设备有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京东城区银河soho
联系电话	010-63331059 13910591117

## 产品详情

玻瓶注射液加温柜FYL-YS-431L

玻瓶注射液加温柜FYL-YS-431L

逐步实现企业多元化经营、集团化、信息化统计、追求高端、宽阔的企业价值；建立良好的诚信体系，以客户为导向，加强企业控制能力，重目标，重执行，重结果，追求的客户满意度。很多与药店和其他应用恒温保存的个人，也对福意联（Fuyilian）的”福意联冰箱（柜）“赞不绝口，产品销量逐年递增。我们借鉴优异的压缩机制冷和十多年的，以及一批立志于创新的科技人员和高素质的员工队伍，一直致力于精密的温度控制的保存设备的设计，为广大科技企、高等院校及其他潜在客户提供优良的恒温冷藏保存设备，创造精美事业。

【产品型号】 FYL-YS-230L

【容 积】 230L

【温度范围】 2~48

【额定电压】 AC220V

【额定频率】 50Hz

【外形尺寸】 595 × 570 × 1215mm

【商品重量】 47kg

【气候类型】 N.SN

【制冷剂用量】 R600a(43g)

【额定输入电流】 0.8A

福意联福意联玻璃瓶注射液加温柜FYL-YS-431L产品的临床作用

### 1、预防术中低体温症

在临床手术当中，术中低体温是较为常见的并发症，尤其是对于那些老年人、小儿、复杂疑难手术以及长时间手术的患者来说更容易发生。术中低体温会带来许多不良后果，如增加循环阻力、增高术中和术后的交感神经张力、增高黏滞度以及使外周管收缩等，对患者的身体健康造成了严重危害，同时对手术造成了大的风险因素。基于此，本企业邀请和组织长期从事围手术期医护人员及主任医师研究与探讨了手术当中切实保温，并研发生产出了注射液加温柜产品，解决了手术中低体温症带来的手术风险问题，为广大医务工作人员在术中提供了防护措施，将术中低体温对患者造成的不良影响降到。

### 2、预防术中寒颤

术中由于各种因素的影响使患者容易出现体温下降而导致寒颤，如手术间温度低于22度、各种操作影响，特别是术中用温度较低的冲洗液冲洗腹腔、静脉输注大量的温度较低的液体，使患者的体温下降，突出的表现为寒颤。为预防手术患者发生寒颤这一现象，利用注射液加温柜产品采取对冲洗液、输注液体如生理盐水、甘露醇等药液的加温保温，解决了术中寒颤问题的发生。

### 3、降低术后感染率

在围手术期内，防止术后外部伤口及内部感染，是保证手术成功和患者康复的重要因素和环节。在以往认为做好相关清洗及清洁杀菌工作即可有效防止感染的出现，而通过院感科的深入调查研究及临床实践证明，在手术时用于冲洗腹腔及伤口的冲洗液和输注液体药品时的温度会间接影响术后感染率的发生，因使用过高或者过低温度的液体都会对组织细胞造成破坏，因此使用接近于人体温度（37度）或高于人体温度3-5度的冲洗液体，会减少围手术期的感染率。

使用科室

玻瓶注射液加温柜FYL-YS-431L适用范围：主要用于医院、手术室、门诊、急救中心、放射科，内科，等。用于解决手术室及药剂科等科室的液体37度加温和保温。如：透析液 甘露醇,冲洗液 生理盐水等。

福意联玻瓶注射液加温柜FYL-YS-431L产品简介:更多详细资料请来电

A、多种容量规格B、搁架层数；多层可调；C、送风循环方式：强制送风循环,多孔入风使箱体内温度更均匀D、温度：2 ~ 48 /0 ~ 100 （2款可选）每度恒温可调，可根据物品的种类设置温度，以达到理想效果，同时安全有效地保证了物品本身具有的特性；E、钢丝浸塑搁架或不锈钢搁架，用户可根据存放物品的多少调节搁物架间距，提相对空间利用率F、高低温报警，断电报警，温感故障报警等；G、采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。I、安全门锁设计，实现人管，防止随意开启。

玻瓶注射液加温柜FYL-YS-431L注意事项：1、在使用之前，请首先仔细阅读技术说明书。2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，只需按键设置所需温度即可。3、工作：待箱体温度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。4、停机：使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果更好。7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。8、开关机时长按开关机键即可。

北京福意电器有限/北京福意联医疗设备有限。销售员：海涛 经理

您看到的产品如果不是您需要的或者理想的产品，请不要着急，请致电，我会以快的时间和您沟通，提供您需要、满意的产品！并提供相关的业服务！欢迎来电咨询！

福意联急诊科输液加温箱FYL-YS-280L参数

产品型号 输入电压 功率 商品重量 外形尺寸 商品容量 温度范围  
FYL-YS-150L AC220V 100W 47KG 595\*570\*865mm 150L 2-48  
FYL-YS-230L AC220V 160W 68KG 595\*590\*1215mm 230L 2-48  
FYL-YS-280L AC220V 160W 73KG 595\*570\*1445mm 280L 2-48  
FYL-YS-310L AC220V 160W 78KG 515\*530\*1185mm 310L 2-48  
FYL-YS-430L AC220V 160W 105KG 595\*680\*1805 mm 430L 2-48  
FYL-YS-151L AC220V 100W 64KG 595\*565\*860mm 150L 0-100  
FYL-YS-281L AC220V 160W 99KG 595\*565\*1440mm 280L 0-100  
FYL-YS-431L AC220V 160W 129KG 595\*675\*1795mm 430L 0-100

玻瓶注射液加温柜FYL-YS-431L

服务技术1 定期给每位购买产品的顾客进行电话回访；（做好客情记录并完整交接工作）2  
尽量把顾客异议和矛盾处理在时间、客户家中，而不要带到会场，减少退货；3 遇到客户抱怨，勇敢面对，积处理；  
4 给客户承诺的内容要及时反馈业务部门，并及时落实；5  
要多上门回访，处理抱怨，避免退货和投诉；6 已购客户检测表要有具体参数登记，以便于复查时，有对比的，同时让工作人员准确掌握客户情况，保证仪器效果；