

# 理疗电极片简介

产品名称	理疗电极片简介
公司名称	河南东璧医疗设备有限公司
价格	10.00/套
规格参数	型号:DB-A型 规格:160 材质:水凝胶
公司地址	河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风东路相济路
联系电话	15093213211 15093213211

## 产品详情

### 使用方法

- 1.在使用本产品之前,请将要粘合的部位清洗干净。
- 2.将包装袋撕开,将本品连接到中低频治疗器的导线上,揭开胶带,将胶带直接粘附在治疗器上。
- 3.按治疗器的说明书打开开关,操作治疗器。 使用完毕后,关掉开关,取下胶卷,保存好,下次再用。

### 注意事项:

- 1.在使用理疗电极片前要注意清洁皮肤,因为人体的皮肤导电性较差,如果皮肤上存在油脂和皮屑等附着物,会对理疗电极片的性能产生影响,影响到理疗仪器的性能。
- 2.电极片本身具有导电层,在使用时,将黑色导电层直接贴在皮肤上,以确保与皮肤紧密接触,使电流与皮肤均匀接触并流向身体。
- 3.自粘胶导电加水护理可使粘胶保持良好的电导率和粘度。
- 4.部分患者使用粘胶片会引起过敏反应,如果发现有不快感,应立即停止使用。