

犬咬伤清创机-针对动物咬伤清洗-欢迎来电咨询！

产品名称	犬咬伤清创机-针对动物咬伤清洗- 欢迎来电咨询！
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

犬咬伤清创机

犬伤清创机采用脉动压力技术，使用无线冲洗枪+特制枪头，采用无菌包装的犬清弱碱性皮肤黏膜消毒液，通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。

产品特点1、犬伤清创机取得《中华人民共和国医疗器械注册证》，号：符合卫生部《狂犬病暴露预防处置工作规范》，符合CDC《狂犬病预防控制技术指南》要求 冲洗报告、自动记录、打印并签字确认，严格避免医疗事故，杜绝医患纠纷！2、有效 西省人民医院、西省中医学院附属医院临床试验报告均证实了清创机的有效性。《》弱碱性皮肤黏膜清洗剂、《》消毒喷剂含有葡萄糖酸氯己定、表面活性成分，杀毒，无刺激、还可8小时长效抑菌，有效降低犬伤并发感染和继发细菌感染率。3、便捷 一键自动冲洗、清单自动打印，记录自动保存、统计，枪柄无线控制压力，解放门诊人力物力！带快捷接口的《》弱碱性皮肤黏膜消毒液+《》消毒喷剂，免去配皂液、涂碘伏等繁琐的流程，安全又高效！推车式设计，自由移动，不受使用场景、环境、场地的限制！

治疗机理1、全自动控制系统整套控制系统以国家规范为框架，以伤患的安全为目标，的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。整个冲洗过程中水温、水压、犬清弱碱性皮肤黏膜消毒液与清水的交替冲洗、生理盐水的后冲洗都会自动完成结束时的小票打印等自动完成，并会作出语音提示，无需做其他任何操作针对重伤患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，人员可根据情况选择优的冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，极大降低医护人员工作负担）。2、高频脉冲灌冲频脉动灌冲高频脉动灌冲卫生部《狂犬病暴露预防处置工作规范》硬性要求，深创必须使用高频脉冲器械进行灌冲冲洗。压力水柱结合间歇性的大量水泡瞬间爆裂的冲击，共同作用在冲洗创面，使创口组织规律的收缩舒张，使创面缝隙中的破碎组织、杂质、病毒、细菌被翻动冲出。显著降低患者疼痛阈值，不破坏健康组织，冲洗工作安全高效。脉动压力大压强56kPa,频率每分钟900~1800次，安全快速，不会造成清创部位组织水肿。3、多功能冲洗枪功能冲洗枪无线控制，枪不离手进行启停控制无线控制，枪不离手进行启停控制，精确、方便没有累赘的电源线、控制线等，减少故障概率。针对不同类的创口，特别研制了多种场景的特制枪头，以保障犬伤清创冲洗的安全高效。例如针对大面积撕裂伤特有扇面枪头；针对开口小，创伤深的伤口有精细枪头可对深创面做彻底灌注冲洗。

适用科室犬伤门诊、急诊专用