

# SHINVA XGD-IV 骨钻 电机不转电池后盖坏，拧不动

产品名称	SHINVA XGD-IV 骨钻 电机不转电池后盖坏，拧不动
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

电动锯钻维修更换 广州云启医疗-维修耳鼻喉科/五官科/骨科/整形科/眼科等系列动力系统。维修范围：动力声乳化仪、超乳手柄、动力手柄、刨削手柄、脚踏、气动软轴、子宫粉碎器、植皮刀、骨钻、摆锯、矢状锯、

维修品牌：MEDTRONIC、STRYKER、SMITH&NEPHEW、LINVATEC、WOLF、STORZ、AESCULAP、Bie-  
我公司医疗器械维修，可服务于个体，公司，医院，公司团队拥有多名对国内外各品牌有深刻认知的维修技  
公司的维修服务定位是通过与客户建立稳定长期的设备维修，保养的服务关系。维修服务热线24小时在线，24  
1、直接作用于病灶组织，保护正常组织及功能； 2、精密的设计符合人体工程学，便于操作； 3、微创、安  
5、疗效确切、不影响正常工作。

广州云启医疗设备有限公司针对动力系统维修服务，可以维修stryker的动力系统。服务项目有：动力主机、脚踏  
m6系列骨钻等。常见的型号有：

SE5主机/脚踏、5100-1 TPS小骨动力主机、脚踏5100-8、5100-2动力系统、小骨动力主机TPS Plus、小骨动力Co  
、5100-10-72弯接头、5100-120-452接头、5100-4电缆、5100-100 u2钻、5100-010-060 颅骨钻接头、5100-010-452 脚

290-601-200 刨削动力手柄、5400-100 CORE通用钻、5400-110 高扭矩通用钻、5400-37 CORE往复锯、5400-15/7  
、272-704-500 刨削动力手柄、UHT高扭矩通用钻、FORMULA CORE 375-704-500、FORMULA 180 375-708-500  
4103 旋转锯、4107 摆锯、4103，4105，4107，4108、4207、4208矢状锯、system6 系统6 矢状锯 胸骨锯 钻6205,62

维修案例一： BOJIN BJZ-1 电动锯钻 故障检测：电机坏，不转动，电池后盖坏，拧不动 维修方案：更换  
保修周期：非人为保修3个月 维修案例二： SHINVA XGD-IV 骨钻 电机不转 设备名称：SHINVA XGD  
维修周期：3个工作日，非人为保三个月 维修案例三： Stryker 4208 电动骨钻 电机坏 设备名称：Stryker  
维修方案：更换电机 维修时间：3个工作日左右 保修周期：非人为保修3个月

广州云启医疗设备维修服务有限公司的动力系统维修，常见的维修项目：动力系统主机、刨削动力系统、切割  
矢状锯、接头等；

刨削手柄常见故障有：

一、电机无法转动，一般是手柄电机故障，一般多为电机进水引起的生锈。

解决方法：维修，更换电机。

二、按键无法使用。该款按键是采用特殊材料的按键，用普通的按键是代替不了的，只能用特定的按键。该按

解决方法：更换按键

三、电缆线故障，多数情况为：电缆内阻变大，氧化等，或电缆线的外皮破裂。还是情况就是电缆线接口问题

解决方法：更换电缆，维修电缆。

四、轴承故障：多数情况为：轴承进水引起的生锈，卡死，断裂。

解决方法：更换轴承。