

## 狗咬伤冲洗设备-狗咬伤冲洗机

产品名称	狗咬伤冲洗设备-狗咬伤冲洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

### 狗咬伤冲洗设备-狗咬伤冲洗机

犬咬伤冲洗设备--犬伤冲洗器适用于各种犬咬伤清洗清创、动物咬伤抓伤清洗清创等，利用肥皂水（弱碱性溶液）加生理盐水即可清理，56KPa的脉冲压力，每分钟800-1800次的脉冲频率，可以快速有效清除创面杂物、污渍、唾液等。降低伤口内细菌和病毒含量，预防狂犬病。

犬伤冲洗系统（医用创口冲洗机）、犬咬伤冲洗器、狂犬病伤口冲洗机适用于动物抓、咬伤后的皮肤及黏膜伤口的冲洗、消毒(包括对狂犬病毒的清洗和消毒)。可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌及白色念珠菌等。是一款用于标准化犬伤门诊建设的医用外伤冲洗器。

### 狗咬伤冲洗设备-狗咬伤冲洗机

配有专用弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂及高低位冲洗池，通过脉冲式水流对伤口、创口进行交替灌洗，达到减少细菌病毒数量的目的，符合规范化犬伤伤口处置规范，是犬咬伤标准化门诊建设常用设备。

### 伤口冲洗的重要性：

被动物咬伤而感染病毒，病毒在伤口周围肌肉组织中复制，狂犬病毒通常在伤口周围肌肉组织停留至少72小时，长可达两周以上才能进入末梢神经。此阶段伤口清洗尤为重要，目

的是降低伤口内的病毒和细菌含量，是我们降低狂犬病发病率的一个关键措施。

## 狗咬伤冲洗设备

适用于各种犬咬伤清洗清创、动物咬伤抓伤清洗清创等，利用肥皂水（弱碱性溶液）加生理盐水即可清理，56KPa的脉冲压力，每分钟800-1800次的脉冲频率，可以快速有效清除创面杂物、污渍、唾液等。降低伤口内细菌和病毒含量，预防狂犬病。

规范要求 狂犬病暴露后预防处置工作规范（2009）第7条中提到

伤口冲洗:用20%的肥皂水(或者其他弱碱性清洁剂)和一定压力的流动清水交替彻底清洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟.....较深伤口冲洗时,用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部进行灌注清洗,做到全面彻底。 狂犬病预防控制技术指南2016版（中国疾控20160815）暴露后置:伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许,建议使用狂犬病清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。 2019年狂犬病暴露处置专家共识建议使用国家二类医疗器械资质的狂犬病暴露冲洗设备和专用冲洗剂对伤口内部进行冲洗

## 产品特点

整套控制系统以国家规范为框架，以伤患的安全为目标，的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。