

## 儿童可调式肘关节固定支具

### 孩子肘关节骨折怎么办--用儿童可调节肘关节固定支具来固定

产品名称	儿童可调式肘关节固定支具 孩子肘关节骨折怎么办--用儿童可调节肘关节固定支具来固定
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

## 产品详情

儿童可调式肘关节固定支具 孩子肘关节骨折怎么办--用儿童可调节肘关节固定支具来固定  
手臂骨折固定

产品介绍：

：儿童可调式肘关节固定支具

:可调式固定支具

:加宽钢板支撑，固定牢固，四条魔术贴设计绑带可调节松紧，穿戴方便，一键式调节长短简单便捷、可调节三位一体卡盘角度锁扣设计，采用亲肤透气可拆卸防滑内衬，不闷热不下滑，清洗方便，超轻钢板设计，减轻患者承重！

儿童可调式肘关节固定支具 孩子肘关节骨折怎么办--用儿童可调节肘关节固定支具来固定  
手臂骨折固定

: 肘关节骨折、手臂骨折、术后固定、早期拆除石膏后使用、 -

: 均码

: 现依据患者骨折或错位的部位，选择大小合适的支具，再将选择好的支具魔术贴粘扣打开，将患者错位或骨折的部位加衬垫套入支具内，然后将粘扣拉紧即可。

: 要经常检查各部位是否固定牢固，粘扣是否安全可靠，如发现问题及时修理和更换。

固定松紧程度遵医嘱或根据自身情况调节。

固定时间遵医嘱。

使用过程中如出现疼痛或感觉异常请立即停止使用。

: 内衬可用清水清洗，内衬可用清水擦。

: 该产品放于干燥处，通风良好的室内，周围无有害或腐蚀性物品。

儿童可调式肘关节固定支具 孩子肘关节骨折怎么办--用儿童可调节肘关节固定支具来固定  
手臂骨折固定