

广西儿童胸腰椎骨折术后脊柱侧弯矫正，颈椎不适，颈椎骨折可调式儿童头颈胸腰固定支具

产品名称	广西儿童胸腰椎骨折术后脊柱侧弯矫正，颈椎不适，颈椎骨折可调式儿童头颈胸腰固定支具
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

广西儿童胸腰椎骨折术后脊柱侧弯矫正，颈椎不适，颈椎骨折可调式儿童头颈胸腰固定支具

产品介绍：

产品名称：头颈胸固定支具

产品类别：可调式固定支具类

产品备案号：冀衡械备201601682

产品款式：蓝色+白色

产品规格：儿童 S/M/L

性能特点：该产品采用高位加宽肩带设计，保护面积大，胸椎和腰椎患者同样使用，不同体型的患者可以选择不同尺码的产品现场塑型，更服帖。固定效果更好。

适用范围：胸腰椎骨折术后，退化腰间盘突出，压缩性骨折，脊柱侧弯矫正，颈椎不适，颈椎骨折术后

使用方法：将托具置于使用部位后，搭扣扣在前部，根据关节角度，上下调整至舒适位置。

注意事项：要经常检查粘贴部位是否固定牢固，粘扣是否安全可靠，如发现问题应及时修理和更换。

保养方法：可用清水洗涤。

储存方法：该产品应放于干燥、通风良好的室内、周围无有害或腐蚀性物品。

广西儿童胸腰椎骨折术后脊柱侧弯矫正，颈椎不适，颈椎骨折可调式儿童头颈胸腰固定支具

注意事项：

- 1) 要经常检查固定带束紧是否牢固、粘扣是否安全可靠，如发现问题应及时修理和更换。
- 2) 固定松紧程度请遵医嘱。
- 3) 固定时间应遵医嘱。
- 4) 使用过程中如出现疼痛或感觉异常，请立即停止使用。

禁忌症：

- 1)恶性肿瘤及高热患者禁用。
- 2)严重高血压及心血管疾病患者慎用。

保养、清洗方法：

- 1)使用后应清洗干净，存放于通风干燥处，防止日光曝晒。
- 2)清洗时先用中性洗涤剂洗涤，再用清水漂洗后自然晾干。

贮存方法：

应存放于干燥和通风良好的室内，勿与酸、碱等腐蚀性物质混放，远离火源。