

# 犬咬伤冲洗设备—医用创口冲洗机

产品名称	犬咬伤冲洗设备—医用创口冲洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

### 犬咬伤冲洗设备—医用创口冲洗机

被狗咬伤后进行及时正确的伤口处理，不仅能预防狂犬病的发生，还能够预防发伤口发生继发感染，促进伤口愈合。伤口的处理包括对伤口内部进行彻底的冲洗消毒，如果有必要还需要到医院外科进行处置。伤口处理的时间越早越好，\*\*在受伤后立即立即开始，如果在家可选用肥皂水和自来水反复交替冲洗伤口至少20分钟以上，然后用生理盐水冲净伤口肥皂液，再用稀碘伏或苯扎氯铵对伤口彻底消毒，然后赶到近的疾控中心，接种狂犬疫苗和被动免疫制剂。如果伤口严重，还需要根据具体情况到医院急诊外科请医生进行处理。

西安医疗科技公司依托西安强大的教育和科技资源，公司先后与第四军医大学生物工程学院、第四军医大学西京医院、西安交通大学、中科院西安光机所等科研院所联合研发针对狂犬病暴露门诊处置冲洗设备——犬咬伤冲洗设备—医用创口冲洗机。

犬伤清创机采用脉动压力技术，使用特制枪头，采用无菌包装的-犬清TM-弱碱性皮肤黏膜消毒液，通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。医疗犬伤清创机科学的处置能有效减低伤患创口病毒数量，极大提升狂犬病预防有效性；以完全符合国家规定的处置程序有效保障犬伤门诊的权益，规避医疗风险，避免医疗纠纷；的冲洗清创设备可显著降低对门诊处置水平的要求，减轻处置人员的工作负担。全自动控制系统：整套控制系统以国家规范为框架，以伤患的安全为目标，同过的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。整个冲洗过程中水温、水压、犬清TM 消毒液与清水的交替、生理盐水的冲洗以及结束时的小票打印等都是全自动完成，无需做其他任何操作！针对重伤患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，人员可根据情况选择冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，极大降低医护人员工作负担）。高频脉动灌冲：压力水柱结合间歇性的大量水泡瞬间爆裂的冲击，共同作用在冲洗创面，使创口组织规律的收缩舒张，可使创面缝隙中的破碎组织、杂质、病毒、细菌被

翻动冲出，同时显著降低患者疼痛阈值，不破坏健康组织，冲洗工作安全高效。

注：脉动压力压强56kPa,频率每分钟900~1800次，安全快速，不会造成清创部位组织水肿