

医用可调膝关节固定支具支架 髌骨骨折膝盖固定支架 半月板交叉韧带损伤术后护膝护具大腿骨折矫形器

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 医用可调膝关节固定支具支架 髌骨骨折膝盖固定支架 半月板交叉韧带损伤术 后护膝护具大腿骨折矫形器 |
| 公司名称 | 安平县欧博康复器材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 规格:大中小 型号:膝关节矫形器 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注 册地址） |
| 联系电话 | 0318-7528214 15533837232 |

产品详情

安平县欧博康复器材有限公司位于河北省衡水市安平县，是一家研制、生产、销售一类医疗器械的企业，主要生产医用腰围、医用腹带、医用固定带、医用牵引带、医用外固定支具、体位垫（防褥疮垫）、医用骨折固定夹板、四肢约束带、肢体矫形器、自发热护具等产品，其各项指标均符合行业、企业标准规定的产品标准要求，经临床应用多年，深受用户好评。安平县欧博康复器材有限公司医疗产品工艺设备先进，完善的检验手段，严格生产的各个环节确保了产品质量合格。产品在全国各地医院及经销公司，得到广大用户的信赖和好评。我公司与时俱进，加强企业现代化管理，提高综合素质。以科技推动新产品的开发，不断适应市场的需求，坚持互惠互利的原则，共同开发市场。愿与你携手，精诚合作！

膝关节矫形器

『产品类别』：可调式固定支具

『产品名称』：可调膝关节支具

『产品规格』：均码

『性能特点』：

本产品可在0°-120°之间自由调节限位固定，适应需求。可提供支撑，固定，功能活动锻炼，负荷等作用。调整角度只需几秒，简单便捷，易于操作，大大节省了操作时间，提高工作效率。

『使用方法』：

- 1、可调膝关节支架上端的固定带固定在膝关节以上的大腿处。将膝关节支架下端的固定带固定在小腿处。
- 2、固定好大腿固定带和小腿固定带后，将铰链和大腿固定带、小腿固定带相连接固定。
- 3、将粘扣带通过塑料环和两端固定带对称固定。
- 4、调整刻度盘刻度到合适角度即可。

『禁忌症』：

- 1、皮肤不明显肿块；
- 2、有出血倾向（血小板减少，白血病）；
- 3、皮肤终破溃疡。