

DYONICS戴安力7205355刨削动力手柄关节镜动力系统维修

产品名称	DYONICS戴安力7205355刨削动力手柄关节镜动力系统维修
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

DYONICS戴安力7205355刨削动力手柄关节镜动力系统维修

广州云启医疗维修服务有限公司提供维修DYONICS|戴安力|7205355刨削动力手柄|关节镜动力系统维修

DYONICS戴安力刨削动力手柄维修常见型号：

7205355、7205354等动力刨削手柄维修。

动力系统维修品牌：

美敦力Medtronic、Stryker史赛克、施乐辉Smith&Nephew、Dyonics戴安力、Storz史托斯、Wolf狼牌、Linvatec林弗泰克、Aesculap蛇牌、Bienair彼岸、德国Medicon、强生Anspach、Synthes辛迪思、RUDOLF诺道夫、Ackerman艾克曼等。

动力系统维修范围：

按科目分类：

关节镜刨削动力系统、耳鼻喉动力系统、耳科动力系统、五官科动力系统、微动力系统、开颅动力系统、神经外科动力系统、微动力磨骨系统、颌面外科动力系统、牙科动力系统、气动动力系统、植皮刀、高速气钻系统。

按项目分类：动力主机、动力手柄、动力手钻、动力骨钻、动力耳钻、脚踏、接头等。

动力刨削手柄常见故障及解决办法：

一、电缆线故障：

主机无法识别手柄、电缆线接口接触不良、电缆线表皮破损、电缆内阻变大、氧化。

维修方法：更换或者维修电缆线。

二、按键无法使用

解决方法：维修更换按键。

三、电机卡死：

手柄电机故障，常见是电机进水引起生锈导致卡死、转动过慢、电机发热异常等。

维修方法：维修或者更换电机。

四、轴承故障：

轴承进水引起生锈、卡死或者断裂。

维修方法：维修更换轴承。

五、刀头卡不住，夹头断裂。