

# 犬伤医用伤口冲洗器 医疗科技全国招商

产品名称	犬伤医用伤口冲洗器 医疗科技全国招商
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

狂犬病（rabies）是狂犬病毒所致的急性传染病，人兽共患，多见于犬、狼、猫等肉食动物，人多因被病兽咬伤而感染。临床表现为特有的恐水、怕风、咽肌痉挛、进行性瘫痪等。因恐水症状比较突出，故本病又名恐水症（hydrophobia）。狂犬病病毒属于弹状病毒科狂犬病毒属，单股RNA病毒，动物通过互相间的撕咬而传播病毒。我国的狂犬病主要由犬传播。对于狂犬病尚缺乏有效的治疗手段，人患狂犬病后的病死率几近，患者一般于3~6日内死于呼吸或循环衰竭，故应加强预防措施。

犬咬伤清创机，批准文号：20192140067，是医疗器械招商企业西安医疗科技有限公司招商产品，

### 【狂犬病基础知识】

- 1.我国养犬数量超过一亿，每年因犬咬伤而注射狂犬病疫苗的超过1200万人。每年老百姓的狂犬病疫苗免疫和免疫球蛋白支出就超过50亿元。”——狂犬病专家、军事科学院军事医学研究院--涂长春。
- 2.法定报告传染病中狂犬病死亡人数仅次于艾滋病和肺结核；狂犬病疫苗每年的批签1,200-1,600万人份，位列国内前20大产值疫苗品种榜首，遥遥其他疫苗使用市场。——摘自《中国狂犬疫苗市场调研与投资研究报告》。
- 3.中国宠物行业规模在2017年达到1,340亿元，在2015年至2025年期间将保持年均30.9%的高增速发展，但同时多地市犬伤门诊量每年增长也在20%以上。

### 【犬咬伤清创机简介】

- 1.清创机号：。
- 2.清创机的结构：犬伤清创机采用脉动压力技术，使用特制枪头，采用无菌包装的-犬清TM-弱碱性皮肤黏膜消毒液，通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。

## 【技术特点】

1.全自动控制系统：整套控制系统以国家规范为框架，以伤患的安全为目标，同过的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。整个冲洗过程中水温、水压、消毒液与清水的交替、生理盐水的后冲洗以及结束时的小票打印等都是全自动完成，无需做其他任何操作！针对重伤患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，人员可根据情况选择优的冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，极大降低医护人员工作负担）。

2.高频脉动灌冲：压力水柱结合间歇性的大量水泡瞬间爆裂的冲击，共同作用在冲洗创面，使创口组织规律的收缩舒张，可使创面缝隙中的破碎组织、杂质破坏健康组织，冲洗工作安全高效。

注：脉动压力大压强56kPa,频率每分钟900~1800次，安全快速，不会造成清创部位组织水肿”

3.多功能冲洗枪：同时枪头手柄带无线控制开关，枪不离手随时调节水压。为了针对不同类的创口，特别研制了多种场景的特制枪头，以保障犬伤清创冲洗的安全高效。例如针对大面积撕裂伤特有扇面枪头；针对开口小，创伤深的伤口有精细枪头可对深创面做彻底灌注冲洗等。

4.犬清TM弱碱性清洗消毒剂：含有二癸基二甲基氯化铵、葡萄糖酸氯己定、表面活性成分等，高效杀毒，无刺激、8小时长效抑菌同时促进伤口快速愈合，有效降低犬伤并发感染和继发细菌感染率。

## 【犬伤清创机特性】

1.：犬伤清创机取得《中华人因共和国医疗器械注册证》，号：

符合卫生部《狂犬病暴露预防处置工作规范》，符合CDC《狂犬病预防控制技术指南》要求冲洗报告、自动记录、打印并签字确认，严格避免医疗事故，杜绝医患纠纷。

2.有效：西省人民医院、西省中医学院附属医院临床试验报告均证实了清创机的有效性。

《犬清TM》弱碱性皮肤黏膜清洗剂、《》消毒喷剂含有葡萄糖酸氯己定、表面活性成分，杀毒，无刺激、还可8小时长效抑菌，有效降低犬伤并发感染和继发细菌感染率。

3.便捷：一键自动冲洗、清单自动打印，记录自动保存、统计，枪柄无线控制压力，解放门诊人力物力带快捷接口的《犬清TM》冲洗消毒液+《》消毒喷剂，免去配皂液、涂碘伏等繁琐的流程，安全又高效。

推车式设计，自由移动，不受使用场景、环境、场地的限制。