

【友情提醒】将艾绒或剪好的艾断儿 放置在温灸器里点燃。手持悬于患处。手持调整升降的高度来调节火力。以微烫而不痛为宜。火力过小，效果不佳。灸器内部为两层，取出内层，可将药饼、蒜、姜等隔于二层之间，名曰：隔物灸。使灸过程中不要让铜罐外表碰到皮肤，以防烫伤.右上方的黑色胶皮垫一般垫在铜温灸器的底部，防止灼伤皮肤。另外配有小绑带和挂钩，可以佩带胶皮垫固定在施灸处