

花生分娩球孕妇厂家-品牌-图片分娩球配合自由体位待产

产品名称	花生分娩球孕妇厂家-品牌- 图片分娩球配合自由体位待产
公司名称	湖南中伦精密科技有限公司
价格	451.00/个
规格参数	尺寸:108cm*54cm或者58cm*29c 材质:防爆PVC 颜色:香薰紫、天空蓝
公司地址	湖南省长沙市岳麓区望月湖街道望月湖9片1栋10 2房
联系电话	18273146314 18273146314

产品详情

花生分娩球孕妇厂家-品牌-图片分娩球配合自由体位待产：有何好处？有哪些实施要点？

大家都知道，传统的待产模式，就是躺在床上，静待宫口开放。但是其实，这种待产方式并不那么受欢迎，因为宫缩来临时，孕妈妈们大多会腰酸背痛，也会下腹坠痛，这种体位并不能缓解疼痛，反而会适得其反。那么，如何才能通过改变待产体位来缓解疼痛呢？分娩球配合自由体位待产就可以轻松达到这个目的。

Q1湖南中伦分娩球的应用原理

首先，分娩球不是瑜伽球，分娩球是加厚防止突然破裂，满足特殊人群产妇使用，瑜伽球是运动级别，健身或者运动使用，分娩球比瑜伽球安全系数要高几个数量级。正确使用分娩球可以有效分摊孕妇待产过程中所承受的腰背部及骶尾部压力，同时，孕妇通过左右，上下晃动，及相应按摩，可以放松肌肉紧张，打开骨盆，从而使产道充分扩张，达到减轻疼痛，加快产程进展的目的。

Q2如何使用湖南中伦分娩球

(1) 坐姿

孕妇坐在分娩球上，双脚分开保持平衡，左右晃动骨盆，或者上下颠动。分娩球托住了会阴部，就可以达到缓解盆底压力，放松肌肉紧张的作用。

(2) 跪姿

孕妇跪在瑜伽垫上，双手抱住分娩球，头也靠在上面。邀请陪伴者或医护人员帮忙按摩腰骶部最为疼痛的位置。这个体位可以有效缓解腰背部酸痛，从而减轻待产过程中的痛苦。

(3) 侧卧位

孕妇在床上侧卧，将分娩球置于两腿之间。该动作可以充分打开骨盆，从而加快产程。同时，该体位还可以用于分娩镇痛。

(4) 背式

比较适合分娩过程中腰背部痛严重的妈妈们。将分娩球固定在墙角，单纯倚靠在分娩球上，帮助按摩腰背部，减轻疼痛。也可将分娩球靠紧墙面，背部贴紧分娩球，从站姿开始缓慢下蹲，膝盖弯曲到妈妈可以承受的角度。

Q3湖南中伦分娩球的选择与使用

- 1、球的质量是安全的第一保障；
- 2、球的大小应适合自己的身材；
- 3、分娩球充气不要太满，约充气70-80%，坐上去应有一定的弹性空间；

4、坐在分泌球上时，双腿屈曲，大腿与身体以90度左右为宜，坐球、起身感觉舒适自如；

5、球体zuihao能有一定的前后左右移动空间。

Q4湖南中伦分娩球的使用禁忌

1、妊娠合并相关疾病，如高血压，心脏病等

2、胎儿因素，如胎膜早破，胎心不好等

3、使用分娩镇痛或安定药物的孕妇

Q5湖南中伦分娩球的厂家

湖南中伦精密科技有限公司，成立于2014年，公司技术实力雄厚，与多个省妇幼保健院、产科等密切合作与联系，具有多年的经验，值得新老客户信赖，主营导乐分娩产品，包括导乐球、花生球、导乐球架、导乐车、分娩车、产程车、热敷镇痛黄豆袋、摇摆导乐椅、导乐分娩凳、导乐师椅、分娩椅、香薰灯、分娩池、婴儿模型、产科模型、分娩台架等助产工具，拥有多项专利技术，真诚欢迎各界进一步深化合作。

Q6花生分娩球的参数

尺寸：108cm*54cm或者58cm*29cm

材质：防爆PVC

型号：FMHS-1（108cm*54cm）或者FMHS-2（58cm*29cm）

产地：长沙

品牌：湖南中伦

颜色：[香薰紫](#)、[天空蓝](#)

配置清单：花生球架

性能要求；加厚防爆

Q7导乐球架配合导乐球

导乐球架配合导乐球，是一个辅助用具，起到固定导乐球的作用。导乐球架能够固定移动的分娩球，这是因为产妇刚刚使用时，坐不稳，同时产妇行动不便，需要导乐球架的固定。

导乐球架配置清单

1. 靠背

2. 螺栓

3. 靠背软垫

4. 防护脚垫

5. 说明书

6. 合格证