

冲洗液加温箱FYL-YS-430L温度每一度可调

产品名称	冲洗液加温箱FYL-YS-430L温度每一度可调
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74340.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

?)冲洗液加温箱FYL-YS-430L温度每一度可调产品说明-

针对众多医用所提出的医用液体需要加温来保证病人输液、冲洗的安全性，和舒适度，我公司针对医用液体加温领域隆重推出的各个型号 医用液体加温箱保证了各个科室业配套使用。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

冲洗液加温箱FYL-YS-430L温度每一度可调产品参数：

【产品型号】FYL-YS-230L 【容 积】230L【温度范围】2~48 每度可调【额定电压】AC220V
【额定频率】50Hz【外形尺寸】595×590×1215mm【商品重量】47kg
【气候类型】N.SN【制冷剂用量】R600a(43g)【额定输入电流】0.8A

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。3、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度凝露。4、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有安全锁功能，防止出现意外。5、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。6、采用风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀。温度偏差范围小。7、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温死角。降温或制热速度，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体采用钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙1把

冲洗液加温箱FYL-YS-430L温度每一度可调使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

冲洗液加温箱FYL-YS-430L温度每一度可调相关-

术中输注液体与冲洗液体加温在术中低体温护理中的应用效果。方法：选择我院接收的手术患者 100例，根据入院治疗顺序随机分成对照组与观察组各50例，对照组采取液体不加温措施，观察组则在手术过程中将冲洗液体和输注液体加温为37℃，统计两组患者术中的体温变化情况及术中不良反应，并将结果进行对比。结果：经治疗后，观察组患者术中的体温变化幅度显著小于对照组，比较差异显著（ $P < 0.05$ ）；两组患者在术中没有出现明显的不良反应情况，比较差异不显著（ $P > 0.05$ ）。结论：对患者应用加温术中液体的方法安全，可以保证患者在手术过程中体温的稳定，为手术的成功完成提供了强有力的保证。冲洗液加温箱FYL-YS-430L温度每一度可调