

## 37 恒温箱用于手术室保温液体

产品名称	37 恒温箱用于手术室保温液体
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73430.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 37 恒温箱用于手术室保温液体产品说明-

手术中的病人本身的体质就是非常弱，体温偏低，所以在冲洗伤口时，药品的温度也是起到至关重要的一步，温度过低会使手术中的病人发生生命危险，并引发低温症。所以手术室中的药品保持在人体正常的温度37℃，保证病人的生命安全，也给病人起到身体保温的作用，更加保证了手术的成功率。

### 37 恒温箱用于手术室保温液体产品参数：

【产品型号】 FYL-YS-281L 【产品形式】 立式 【冷却/加热方式】：风冷+发热丝 【噪音】 46dB(a) 【功率】 160W 【电源】 AC220V，50Hz 【温度范围】 0-100℃ 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×565×1440mm 【有效容积】 280L 【重量】 99kg 【温度显示】 LCD数字式 【外门锁扣】 有

1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧内胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警保证安全运行防止发生意外8、采用风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内部温度均匀恒温死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精度高。9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架5个5、钥匙2把

37 恒温箱用于手术室保温液体使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

37 恒温箱用于手术室保温液体相关-

术中保温护理对腹腔镜下子宫肌瘤剔除术患者术后低体温反应及应激反应的影响.方法 选取2014年7月~2015年7月该院收治的行腹腔镜手术的子宫肌瘤患者86例,随机分为观察组和对照组,每组43例.对照组术中应用常规性护理,观察组术中应用加温保护.记录两组患者术中低体温反应发生情况、术中-量、输血量及应激反应情况.结果 观察组术中低温发生率、寒战发生率、苏醒延迟发生率低于对照组(均 $P < 0.05$ ),观察组的气管拔管时间、术后苏醒时间短于对照组(均 $P < 0.05$ ).观察组术中血糖水平、收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、心率水平低于对照组( $P < 0.05$ ).结论 术中保温能有效降低腹腔镜下子宫肌瘤剔除术患者低体温反应,减轻患者术中的应激反应,有利于促进患者术后苏醒,提高患者术后的苏醒质量.37 恒温箱用于手术室保温液体