

医用液体保温箱用于输注液体保温

产品名称	医用液体保温箱用于输注液体保温
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70732.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用液体保温箱用于输注液体保温产品说明-

手术室21 的室温对全身裸露及状态下的手术患者已是冷环境。几层手术敷料在较长时间的手术中起不到保暖作用，因而患者体温往往低于3 ，术中很容易出现寒战。此外，若患者在术前皮肤时身体暴露时间过长，同时受到冷液刺激；手术过程中非手术部位的暴露及手术部位暴露体腔的时间过长也易导致患者低体温。不同程度低体温可以引起患者全身多器官系统的改变：低体温使凝血物质活性下降，易导致术后-增多。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

医用液体保温箱用于输注液体保温产品参数：

【产品型号】FYL-YS-151L【产品形式】立式【冷却/加热方式】风冷+发热丝【噪音】42dB(a)【功率】120W【电源】AC220V，50Hz【温度范围】0-100 【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm【有效容积】150L【重量】64kg【温度显示】LCD数字式【外门锁扣】有1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。5、适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度凝露。6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外8、采用风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度，设定的温度在短时间

里，即可达到设置温度要求、温度度高。9、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。12、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管，保证物品安全，13、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

医用液体保温箱用于输注液体保温使用说明：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用液体保温箱用于输注液体保温相关-

术中输注液体与冲洗液体加温在术中低体温护理中的应用效果。方法：选择我院接收的手术患者 100例，根据入院治疗顺序随机分成对照组与观察组各50例，对照组采取液体不加温措施，观察组则在手术过程中将冲洗液体和输注液体加温为37℃，统计两组患者术中的体温变化情况及术中不良反应，并将结果进行对比。结果：经治疗后，观察组患者术中的体温变化幅度显著小于对照组，比较差异显著（ $P < 0.05$ ）；两组患者在术中没有出现明显的不良反应情况，比较差异不显著（ $P > 0.05$ ）。结论：对患者应用加温术中液体的方法安全，可以保证患者在手术过程中体温的稳定，为手术的成功完成提供了强有力的保证。医用液体保温箱用于输注液体保温