

超声波护眼仪

产品名称	超声波护眼仪
公司名称	许昌百昌纳米科技有限公司
价格	2980.00/台
规格参数	
公司地址	许昌市中原电气谷平安大道1号
联系电话	0374-8319319 18637498813

产品详情

超声波护眼仪是经过多年多时间研发出来的眼科的个人护理用品，日本同款产品在第16届日本临床眼科会，第1届国际近视研讨会上发表了临床试验结果，经过多年不断改进，全日本及港澳台地区已经销售出100多万台。本产品手持直接贴在眼脸上，震动次数1秒能达到约24000次，每次10分钟，每天1~2次。因为是纵波微弱的超声波，穿透力强，微波的超声波直接按摩睫状体，舒缓韧带，视网膜的调节能够更加顺利，在超声波的震动下，毛细血管扩张，血液量增大，血液流通顺畅，视网膜的感光度提高，看东西会感觉更加明亮清晰。还有，淋巴和房水增大，加快新陈代谢，视力得到改善!

使用方法:

- 1、安装好4节5号电池，按开关键，电源开启指示灯亮，并伴有轻微蜂鸣声，超声波开始工作。
- 2、两眼轻闭，将发射口直接轻贴到眼脸部开始投射，一定要垂直投射。一次使用周期是10分钟，5分钟会提醒一次，工作结束后会有“滴滴”声提醒并自动关机。使用时双眼交替使用，不可一次照射2只眼睛。

使用要点:

全身心放松时使用效果更佳，本产品就是本来就是为缓解各器官疲劳而设计的，所以可以一边听音乐一边坐下来非常轻松的姿态来体验本产品的效果会更好，到了10分钟，器具的震动会自动关闭。主要注意就是一个不要带着隐形眼镜照射。照射时眼睛要闭着，垂直照射。超声波护眼仪无任何副作用、后遗症。

