

狂犬病暴露专用设备-犬伤冲洗机

产品名称	狂犬病暴露专用设备-犬伤冲洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	电源:AC 220V 50Hz 核心技术:最大冲洗压力56kpa , 工作模式:自动和手动二种工作模式 ,
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

狂犬病暴露专用设备-犬伤冲洗机

伤口冲洗的重要性：

被动物咬伤而感染病毒，病毒在伤口周围肌肉组织中复制，狂犬病毒通常在伤口周围肌肉组织停留至少72小时，长可达两周以上才能进入末梢神经。此阶段伤口清洗尤为重要，目的是降低伤口内的病毒和细菌含量，是我们降低狂犬病发病率的一个关键措施。

狂犬病暴露后处置两个目标:

一预防狂犬病的发生;

二预防伤口发生继发细菌感染，促进伤口愈合和功能恢复。

现状: 在全球广泛分布。进入21世纪后仍然是重要的公共卫生威胁，全球每年约有60000人死于是致死人数多的动物源性的狂犬病患者数居全球估计年人数达30000人。2004-2014年人数一直高居我国人数的前3位。 暴露后处置两个目标: 一的发生; 二伤口发生继发细菌感染，促进伤口愈合和功能恢复。 伤口处理: 伤口处理包括对伤口内部进行的冲洗、消毒以及后续的外科处置，这对于发生，避免继发细菌感染具有重要意义。

伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许,建议使用清洗设备

和清洗剂对伤口内部进行冲洗。然后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残留。
消毒处理冲洗后用稀碘伏(0.025 %-0.05 %)、苯扎氯铵(0.005 %-0.01 %)或其他的皮肤黏膜消毒涂擦或者消毒伤口内部。
----以上资料出自控制技术指南(2016版)

【犬咬伤清创机简介】 1.清创机号：

2.清创机的结构：

犬伤清创机采用脉动压力技术，使用

枪头，采用无菌包装的-弱碱性皮肤黏膜消毒液，通过自动化控制

程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。【产品亮点】 1.医疗犬伤清创机科学的处置能有效减低伤患创口病毒数量，极大提升有效性；以完全符合国家规定的处置程序有效保障犬伤口

诊的权益，规避医疗风险，避免医疗的冲洗清创设备可显著降低对门诊处置水平的要求，减轻处置人员的工作负担。【技术特点】

1.全自动控制系统

：整套控制系统以国家规范为框架，以伤患的安全为目标，同过的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。整个冲洗过程中水温、水压、消毒液与清水的交替、生理盐水的冲洗以及结束时的打印等都是全自动完成，无需做其他任何操作！针对患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，人员可根据情况选择的冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，极大降低医护人员工作负担）。 2.高频脉动灌冲

：压力水柱结合间歇性的大量水泡瞬间爆裂的冲击，共同作用在冲洗创面，使创口组织规律的收缩舒张，可使创面缝隙中的碎组织、杂质坏健康组织，冲洗工作安全注：脉动压力压强56kPa,频率每分钟900~1800次，安全快速，不会造成清创部位组织水肿”

3.多功能冲洗枪：同时枪头手柄带无线控制开关

，枪不离手随时调节水压。为了针对不同类的创口，特别研制了多种场景的枪头，以保障犬伤清创冲洗的安全例如针对大面积撕裂伤特有扇面枪头；针对开口小，创伤深的伤口有精细枪头可对深创面做灌注冲洗等。

4.犬清TM弱碱性清洗含有二癸基二甲基

氯化铵、葡葡

糖酸氯己定、表面活性成分等杀毒，无刺激、8小时长效抑菌同时促进伤口有效降低犬伤并发感染和继发细菌感染率。