

电子称体重秤 福赛

产品名称	电子称体重秤 福赛
公司名称	石家庄市福赛医疗器械有限公司
价格	35.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:福赛
公司地址	石家庄桥东区和平东路20号
联系电话	86-031185040120 13323046817

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	福赛
型号	-	称量范围	-

安全可靠：厚全钢化玻璃台板，液晶显示。

钮扣锂电池为电源（已配），自动归零自动关闭省电功能。

称重范围：2kg-150kg，就算150公斤胖子站上去都不会担心压坏玻璃台面。

精确灵敏：可精确到0.1kg，运用高精度传感器贴片技术，精确敏感。就连吃顿饭，上个厕所，也能感应显示出体重的偏差。

专业包装：出口包装美观精致坚固扎实，送礼体面。

优雅美观的造型设计，精准的显示，让您随时了解自己的体重情况，时刻注意保持自己的完美体形，更是馈赠亲朋好友的“秤”心礼物，送礼送健康！！

基本规格：

称量范围：2.5 - 150kg分度值：0.1kg显示方式：4位液晶显示电源：3伏
cr2032锂电池工作温度：10 - 35摄氏度开机方式：振动自动开关秤量单位：kg/lb自动关机：10秒

操作说明：

脚振动磅面，即可自动开机开机后，显示8，并由左至右端逐位移动，直至显示“0.0”人稳定站在磅面中间，开始秤重，秤量值稳定后，显示闪烁，锁定秤量值。人体秤量值显示，保持10秒后关机打开秤下方电池盖板，将开关拨到所需单位，下端为：“lb”，中间为切断电源，上端为：“kg”若开机显示“lo”，表示电池已低效，应更换电池保持干燥，勿碰水

注意事项

不使用时不要在秤面上堆押物品，以免电池大量消耗，无法正常工作。秤量时双脚尽量靠中间站稳，以防滑倒。人在秤面上应平稳站立，以免无法锁定，显示不准确。不能用力重击秤体不要放在有水渍的地方使用，不能用水冲洗出厂时已装配锂电池