

# 雏鸡自动注射仪/小鸭小鹅自动注射机 国产单针双液自动注射机

产品名称	雏鸡自动注射仪/小鸭小鹅自动注射机 国产单针双液自动注射机
公司名称	湖州中安农业智能科技有限公司
价格	7500.00/台
规格参数	注射剂量:0.3ml~0.9ml 注射剂量精度:+ 0.01ML 产地:常州
公司地址	长兴县经济开发区科技创业园212室
联系电话	13116829946

## 产品详情

详细说明:

雏鸡自动注射仪/小鸭自动注射机 国产单针双液自动注射机

适合给雏鸡、雏鸭、雏鹅进行疫苗注射，具有注射剂量准确、使用方便、自动计数、报警等功能，注射速度可达每小时5000羽，是各孵化场必备仪器。

自动注射机是用于一日龄至七日龄雏禽颈部皮下接种疫苗，抗生素，维他命或其他产品。

注射机有单液和双液两种，单液注射机一次可注射一种液体，双液自动注射机可同时注射两种液体（两

种液体在进入禽体前是不混合的)。

注射机的注射组件有0.1ml、0.15ml、0.2ml、0.25ml、0.3ml、0.4ml、0.5ml几种规格(客户任选一种或几种规格)，也可以根据用户要求定制。

注射机上有总计数器(统计清零前接种过的所有雏禽的数量)和预设定计数器(预先设定要接种的每盒或每箱雏禽的数量，接种到预设定的数量后机器会发出报警以提醒操作人员)。

使用该机器，熟练技术人员每小时可接种3000~6000羽。

禽用自动注射仪计数参数:

电源:220V AC

功率:50W

注射剂量:0.2ml

注射速度:3500羽/h

产品组成:主体箱1个，电源线1根，架杆7#针头20支 50ml注射针筒一支 医用软管1根

## 禽用自动注射仪操作步骤

- 1、将装有疫苗的药瓶挂在架杆上，使药瓶通过软管与后部的外接口连接
- 2、接入220V交流电源，将开关置于一档
- 3、按动注射触发开关数次，直到针头有稳定的射流为止。
- 4、按下清零按钮，使显示数字归零。
- 5、将幼禽面部朝上，贴紧面板，移入注射处，颈部与头部分别与“⇐”型挡板贴紧。
- 6、使幼禽身体触发注射开关，完成注射。
- 7、不使用时，将电源开关置于“0”档，并断开电源线。

## 禽用自动注射仪使用说明及注意事项

- 1、当机器发出“滴……”长鸣时，即注射次数达100次。
- 2、需要重新计数时，请按绿色清零按钮，显示注射次数归零。

- 3、 当日使用结束后，使注射针筒吸入消毒酒精（或者煮沸过的水），通过软管连接机器，推动活塞以对机器内部管道进行清洗。
- 4、 不使用时，请将电源开关处于关闭状态。
- 5、 使用结束后，请揭开档盖，擦干内部水迹。
- 6、 在不注射时请勿将手触碰前端的微动开关，以免对人员造成伤害。
- 7、 非本公司技术人员请勿打开产品外壳。

#### 禽用自动注射仪故障排除

- 1、 针头堵塞（针头正常伸出、但无药液射出），此时机器会发出“滴、滴”的短鸣，关闭电源开关、更换针头即可。
- 2、 微动开关在使用过程中如有损坏，请联系公司技术人员，并将下挡盖取下，寄到我公司。
- 3、 其他使用故障，请联系本公司