

133*100mm大号暖宝宝

产品名称	133*100mm大号暖宝宝
公司名称	永康市芝英西卢忠昊机械配件厂
价格	1.00/盒
规格参数	产品类别:保暖贴 货号:大号暖宝宝 产地:暖宝宝
公司地址	永康市芝英镇西卢村英基山13号
联系电话	86 0579 87455081 13967467376

产品详情

产品类别	保暖贴	货号	大号暖宝宝
产地	暖宝宝	箱装数量	1000

友情提示：暖宝宝包装上的标明的发热温度了持续时间，并非是指在自然通风条件下热片表面的温度和发热时间，而是在特定的封闭条件下测量得到的数据。根据日本标准，是在有多层棉织品覆盖下，经过一定时间的放热的温度和保暖时间得到的数据。由于我们使用的环境不同，因此和我们实际使用时感觉到的温度和时间有一定的差矩，请大家周知。

另外：因为热量有聚集增加的效应，因为在使用时，随着暖宝宝的放热，会在一定时间内聚焦较高的温度，过于贴紧皮肤且通风不好的话，会造成低温烫伤，据研究引起皮肤烫感、烫痛甚至烫伤和烧伤皮肤烫痛阈值一般为皮温41~45；烫伤阈值为44左右。当皮肤温度高达50以上时，几秒钟内即可造成烫伤。请亲们一定注意。

二、作用原理:

一贴热中的原料层可以在空气中氧气的作用下12-16小时内持续不断地释放热量，这种反应过程是从一打开真空包装的时候开始的。

三、功能介绍:

一贴即热，快速驱寒。住 雇础 钛解喘荷视糜诟髦治泛 1、快速缓解并消除各种畏寒疾病引起的疼痛，是关节炎、肩周炎、腰腿痛、风湿及类风湿、四肢发凉、患处遇寒疼痛等疾病患者迅速止痛的即开即用型产品。2、驱寒保暖，促进人体微循环，对手、脚冻伤、骨伤、肌肉损伤等症状具有良好的消肿止痛功能。3、促进经络畅通，热敷相关穴位，消除胃寒不适、经血不通等症状，具有活血化瘀的作用。4、冬季替代厚重的棉衣，为人体提供温度保障。

四、使用方法:

(1) 使用之前将真空包装外袋撕开。(2) 撕开外袋，取出内袋，不需揉搓，将剥离后面的衬纸，贴在内衣外层，用手铺平即可。(3) 使用完后，从衣服上轻轻撕下即可。

注：不可直接贴在皮肤上！

五、注意事项：

1、不要直接贴在皮肤，感觉温度过高请注意使用，贴在内衣外层，防止低温烫伤。长时间同皮肤接触，

可能会导致低温烫伤。

- 2、 孕妇禁用，儿童、老人请在成人监督下使用
- 3、 不要贴在纤维较长或高级衣服上。
- 4、 暖宝宝的最高发热温度为63℃，可持续12 - 16小时均匀放热，晚上睡觉时不宜使用
- 5、 暖宝宝产品请置于干燥、避光处保存
- 6、 避免使暖宝宝的真空塑料包装袋损伤或破坏，否则产品将会失效
- 7、 请注意防止低温烫伤产品入口
- 8、 请避免在同一位置长时间使用,并注意确保皮肤状况,如有异常请及时取下
- 9、 儿童及对温度变化不太敏感的疾病患者,在使用时请特别注意。

保存方法: 避开阳光直射请在阴凉处保存请勿放在儿童容易触摸到的地方。

六.相关问题解答

1、 问暖宝宝为什么能治疗关节炎与畏寒症，原理是什么？

答：关节炎、颈椎痛、肩周炎等关节炎疾病从病理原因上讲都是局部微循环阻滞的结果。而一贴热的主要功能就是促进人体局部微循环系统运转正常，从而消除各种微循环阻滞给人体带来的危害，达到治愈的目的。

2、 问：暖宝宝在什么季节使用？

答：一贴热的效果不受季节影响。相对来讲，冬天的需要量要多于其他季节。

3、 暖宝宝的主要特点是什么？

答：可以12字来概括：随身携带，一贴即热，立刻见效。

4、 问：我经常四肢发凉，如何使用暖宝宝？

答：若四肢发凉，可在双肩部分、双膝部位同时使用暖宝宝，坚持30天，即可收到治愈效果。

5、我在冬天的时候，怎样用暖宝宝保暖？

答：你可以用"鞋用暖宝宝"，坚持使用一个即可。

6、问：我在冬天把暖宝宝在贴身的内裤内侧上，为什么有时候感觉不到热？

答：暖宝宝?闹柿客耆煽浚淮嬖诓蝗鹊那榭觥o衲闷档那榭佳瞻苾前雅 μ 谏诳隳诓啖袞诳慵巴饷娴囊路
獬蘸苕系幕埃捎诘貌坏窖跗囊枚狗从 v 沽耍愿芯醪坏饺取d 阆恍氖雅 μ 谏诳阆獠嗉纯伞?

7、问：冬天穿裙子的时候，怎样用暖宝宝保暖？

答：可在小腹部或后腰部贴一到两贴。若是穿上裙子，可在双膝各贴一贴即可。

8、问：每天什么时候用一贴热最好？

答：可在每天早晨起床时贴上新的，撕下旧的，如此反复即可。

9、问：我冬天出差的时候能光带暖宝宝而不带别的衣服吗？

答：完全可以。在日本及欧美各国，他们就是这样做的。

10、问：我的孩子冬天上学可以用一贴热保暖吗？

答：当然可以。我们国家大多数教室都缺乏保暖设施，孩子在里边