

犬伤处置-医用伤口冲洗机

产品名称	犬伤处置-医用伤口冲洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

犬伤处置-医用伤口冲洗机

2.清创机的结构：犬伤清创机采用

脉动压力技术，使用枪头，采用无菌包装的-弱碱性皮肤黏膜消毒液，通过自动化控制

程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。【产品亮点】1.医疗犬伤清创机科学的处置能有效减低伤患创口病毒数量，极大提升有

效性；以完全符合国家规定的处置程序有效保障犬

伤口

诊的权益，规避医疗风险，避免医疗的冲洗清创设备可显著降低对门诊处置水平的要求，减轻处置人员的工作负担。【技术特点】

1.全自动控制系统

：整套控制系统以国家规范为框架，以伤患的安全为目标，同过的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。整个冲洗过程中水温、水压、消毒液与清水的交替、生理盐水的冲洗以及结束时的打印等都是全自动完成，无需做其他任何操作！针对患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，人员可根据情况选择的冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，极大降低医护人员工作负担）。2.高频脉动灌冲：压力水柱结合间歇性的大量水泡瞬间爆裂的冲击，共同作用在冲洗创面，使创口组织规律的收缩舒张，可使创面缝隙中的碎组织、杂质坏健康组织，冲洗工作安全注：脉动压力压强56kPa,频率每分钟900~1800次，安全快速，不会造成清创部位组织水肿”

3.多功能冲洗枪：同时枪头手柄带无线控制开关

，枪不离手随时调节水压。为了针对不同类的创口，特别研制了多种场景的枪头，以保障犬伤清创冲洗的安全例如针对大面积撕裂伤特有扇面枪头；针对开口小，创伤深的伤口有精细枪头可对深创面做灌注冲洗等。

4.犬清TM弱碱性清洗含有二癸基二甲基氯化铵、葡葡

糖酸氯己定、表面活性成分等杀毒，无刺激、8小时长效抑菌同时促进伤口有效降低犬伤并发感染和继发细菌感染率。