

减肥腰带 按摩腰带 AB360健身腰带

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 减肥腰带 按摩腰带 AB360健身腰带 |
| 公司名称 | 鑫丰电器礼品有限公司 |
| 价格 | 60.00/件 |
| 规格参数 | 产品类别:按摩腰带 品牌:AB360健身腰带 材质:ABS |
| 公司地址 | 中国 河北 石家庄市新华区 石家庄市新华区鑫丰电器礼品销售中心QQ913523557 |
| 联系电话 | 86 0311 89683311 15931179685 |

产品详情

| | | | |
|--------|------|----------|-------------|
| 产品类别 | 按摩腰带 | 品牌 | AB360健身腰带 |
| 材质 | ABS | 规格 | 24.5*8*16CM |
| 按摩部位 | 腰部 | 动力模式 | 电动 |
| 电源方式 | 交流 | 适用场合 | 家庭 |
| 颜色 | 混色 | 箱装数量 | 10 |
| 产地 | 深圳 | 适用送礼场合 | 商务馈赠 |
| 加印LOGO | 不可以 | 是否提供加工定制 | 是 |

【注意事项】1、癫痫症或心脏病患者禁用。2、不要将本品用于脖子、嘴唇、头部或胸部。3、不要将本品用于已感染或易发生刺激反应的皮肤部位。4、经期或孕期请勿用。5、每天使用本品不宜过长。建议每天使用30分钟为宜。6、请将本品保存于儿童接触不到的地方。7、使用时请务必将足够的露状的瘦身膏涂于瘦身带内部的银色部分（勿碰及当中纸封住的中央芯片）。如果涂抹瘦身膏不足，可能会发生刺痛现象。请勿使用浓稠的霜状瘦身膏。8、使用后一、两分钟内，可能会有不同程度的不适反应（如痒、麻、多汗）等感觉，均属于正常反应。

如坚持使用，可去掉体内80%以上的多余脂肪，这正是本款超强碎脂瘦身腰带的神奇功效。

使用说明：本品使用非常简单。装置共三个控制键和一个安全自动定时器，在使用10分钟后，该定时器会将装置自动关闭。1、on/ ：打开装置电源并调高脉冲强度或速度。每按键一次，强度或速度便会调高一个档次。本装置共有十个强度和速度档次。强度越高，收缩就越高。速度越高，输出脉冲就越短。接此键十次，强度和收缩达到最大值。2、off/ ：关闭装置电源并调低脉冲强度或速度。每按键一次，强度便会调低一个档次。如果装置电源已打开，并处于第一档次状态，按off/ 键一次关闭装置电源。3、模式键：选择一种预编程序运动模式（共有六种预编运动模式可供选择，包括三种基本模式和三种混合模式）。1，轻柔：脉冲，轻柔按摩感。2，快速按摩：快速按摩，每秒震动一次。3，挤压式：以慢和快速度进行全身运动。4，左臂：专业运动、混合模式、速度快。

当场体验-您就会感到皮肤收紧，达到减肥瘦身的效果；使您轻松拥有完美的曲线。坚持使用-您就会腰腹缩小，比例匀称，从此告别肥胖，拒绝肥胖。只有体验你就会感到乳房丰挺，臀部上翘，充分显现女性魅力，成为引人关注的目标。才能发现-它对您"啤酒肚"的作用，让您在事业成功的同时，拥有男性健美的体魄、风度和仪表。这是一款最新的专门帮助健身、塑造形体的电子碎脂脉冲腰带！使您可以尽享在家里进行日常锻炼的舒适!想哪瘦就哪瘦，见效快，完全无副作用，男女老少都适宜。·使用10分钟相当在健身房锻炼2个小时；·使用10分钟相当做600个仰卧起坐；·从此减肥不用上健身房，不用节食；·能让你在上班、购物、看电视、做家务.....任何时间、任何地点都能使用；·不仅小腹，连大腿、手臂、臀部任何一处肥胖的部位都能使用，想瘦哪里就瘦哪里！

产品特点：*迷你小巧方便*模拟真人运动按摩程式*极软式电极片紧贴身体，效果更佳*6种模式10级强度，可任意调节*10分钟定时，自动关闭电源*腹部、大腿、小腿手臂等，想瘦哪就瘦哪！

【注意事项】1、癫痫症或心脏病患者禁用。2、不要将本品用于脖子、嘴唇、头部或胸部。3、不要将本品用于已感染或易发生刺激反应的皮肤部位。4、经期或孕期请勿用。5、每天使用本品不宜过长。建议每天使用30分钟为宜。6、请将本品保存于儿童接触不到的地方。7、使用时请务必将足够的露状的瘦身膏涂于瘦身带内部的银色部分（勿碰及当中纸封住的中央芯片）。如果涂抹瘦身膏不足，可能会发生刺痛现象。请勿使用浓稠的霜状瘦身膏。8、使用后一、两分钟内，可能会有不同程度的不适反应（如痒、麻、多汗）等感觉，均属于正常反应。

如坚持使用，可去掉体内80%以上的多余脂肪，这正是本款超强碎脂瘦身腰带的神奇功效。

使用说明：本品使用非常简单。装置共三个控制键和一个安全自动定时器，在使用10分钟后，该定时器会将装置自动关闭。1、on/ ：打开装置电源并调高脉冲强度或速度。每按键一次，强度或速度便会调高一个档次。本装置共有十个强度和速度档次。强度越高，收缩就越高。速度越高，输出脉冲就越短。接此键十次，强度和收缩达到最大值。2、off/ ：关闭装置电源并调低脉冲强度或速度。每按键一次，强度便会调低一个档次。如果装置电源已打开，并处于第一档次状态，按off/ 键一次关闭装置电源。3、模式键：选择一种预编程序运动模式（共有六种预编运动模式可供选择，包括三种基本模式和三种混合模式）。1，轻柔：脉冲，轻柔按摩感。2，快速按摩：快速按摩，每秒震动一次。3，挤压式：以慢和快速度进行全身运动。4，左臂：专业运动、混合模式、速度快。5，右臂：持续震动、低频律。6，腹部/左腿/右腿：一般深度，按摩下身神经，塑造完美身体曲线。

5治郝撼中鸪 推德伞?br>6，腹部/左腿/右腿：一般深度，按摩下身神经，塑造完美身体曲线