

# 儿童鸡胸矫正器的使用方法

产品名称	儿童鸡胸矫正器的使用方法
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:均码 型号:鸡胸矫正器 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

## 产品详情

### 儿童鸡胸矫正器的使用方法

鸡胸矫正器分为两部分：一部分是固定板，是用来压迫胸骨，使胸骨下段向下方回缩；还有一部分是用来固定身体的绑带。

鸡胸矫正器使用的方法可以通过先固定平板下面到腹部，再固定平板上部，使患者有轻度的受压感，但是不能出现明显的疼痛或者呼吸困难的症状。

每天需要固定2个小时左右，通过日积月累，使胸骨的下段逐渐回落形成正常的胸廓形态，大概需要2-3年的时间就能恢复正常的状态，使心脏的功能、肺的功能恢复到正常。

儿童鸡胸矫正器好。因为对于轻度到中度的鸡胸患者，在三岁以后给予鸡胸支具。经过戴鸡胸支具以后，一般两年左右，鸡胸可以达到纠正。因此这个花费比较少，也不用手术，受的罪也比较少，因此它是一项很好的治疗。如果鸡胸矫正器治疗效果不好，还可以再进行手术治疗，这样患者也能够接受。总体来说，鸡胸矫正器对轻度到中度的鸡胸，效果还是比较好的。