

一次性使用病毒采样管

产品名称	一次性使用病毒采样管
公司名称	山东百士医疗器械服务有限公司
价格	6.00/支
规格参数	百士通达:3
公司地址	成武县党集镇德商路北段（造纸厂北100米路西）
联系电话	19819551385

产品详情

1.采样需求，用采样拭子采集样本(未配拭子的保存液，使用人员可自行提供匹配拭子)。

2.将采集样本之后的采样拭子放置到采样管中。

3.在采样拭子杆的易折断截点处折断拭子，弃去尾部，盖好管盖

4.在采样管的标签上按需求标注信息。

5.标本采集后应当在2个工作日内运送至对应的流感监测网络实验室,保存温度为2-8℃;如未能48H内送至实验室的,应当置70℃或以下保存,并保证采集的标本1周内送到对应的网络实验室。标本应当避免反复冻融。

6、鼻拭子，采集者左手扶住患者的下颌部,右手持拭子轻轻插入鼻腔内鼻脐处，停留片刻后缓慢转动3-5圈后退出。以另一拭子擦拭另一侧鼻孔。将拭子头浸入采样液中，在采样液中挤压拭子头部数次，用力折断拭子的尾部，将拭子的尾部弃去。

7、咽拭子，左手用压舌板压住患者舌头。右手持拭子擦拭双侧咽扁桃腺及咽后壁，将拭子头浸入采样液中在采样液中挤压拭子头部数次，用力折断拭子的尾部，将拭子的尾部弃去。亦可将鼻、咽拭子收集于同一采样管中。