

电子 医疗类电子体温计 GF-MT502

产品名称	电子 医疗类电子体温计 GF-MT502
公司名称	杭州广发电子技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:其他 用途:商务礼品 适用场合:商务
公司地址	中国 浙江 杭州市 西湖区西湖科技经济园振华路西段288号（杨家塘38号）
联系电话	86-57188308206 13805705185

产品详情

材质	其他	用途	商务礼品
适用场合	商务	适用行业	通讯行业
品牌	中性	加印LOGO	可以
适用送礼关系	客户	适用送礼事件	活动庆典
适用性别	不限	适用年龄阶段	中年人(36-59)
包装	精致包装		

主要技术参数和特点：

*测温范围：32 ----42 90-108华氏度*测量温度低于32 时，显示l *测量温度高于42 时，显示h *显示分辨率：0.1 *显示方式：液晶显示（三位半）*功

耗：工作状态下为0.15毫瓦*电池：ag3型1.5v普通纽扣电池*蜂鸣提示：测量结束后发出蜂鸣提示声

【使用方法】1，使用前，应先用酒精对体温计传感头进行消毒2，按压电源键，蜂鸣器会发出蜂鸣声，显示提示符号3，随后，显示器显示上次测量的温度，并持续2秒钟，接着显示器。c符号闪烁，表示处于待测状态4，将体温计传感头放入测量部位，显示器显示温度逐渐上升。同时。c符号闪烁，表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变，则。c符号停止闪烁，同时发出蜂鸣提示声，表示体温测量完毕并已记忆测量结果，即可读取显示出的温度值5，测量结束后，如没有按压电源键关闭电源，则10分钟后自动关机