

医用脉动加压冷热敷机治疗系统

产品名称	医用脉动加压冷热敷机治疗系统
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

脉动加压冷热敷机治疗系统

号：TEMP220

传统冷敷：

1、冰块冰敷温度不可控，与不贴合，冰敷效果不佳。皮肤温度至少降至20 以下，关节腔内温度才会下降。国外Schroder等认为只要皮肤及皮下组织温度降到10-15 ，关节腔内温度就可达到要求。而冰块冰敷时，温度会由低变高，冰敷温度无法维持恒定冷敷效果不佳。

2、错误冷敷方式可能引发“继发效应”继发效应是指用热或用冷超过一定的时间，产生与生理效应相反的作用。继发效应是身体的一种防御反应，可保护机体免受损伤。当使用过冷的温度长时间冰敷时，组织下血管收缩，可能会导致局部缺血。机体会调节，强制血管扩张，进一步造成二次出血。为保护患者，必须合理控制冷敷温度和时间！

新一代冷热敷机：

目前，临床针对冷敷治疗时间和方式尚未有标准化指导方针，一般根据病人临床症状，如疼痛、肿胀、渗出等情况，临床有不同的治疗方案：

1.间隔性冷敷方法：每天2-4次，每次治疗20~30min。温度范围控制在10-15 （年轻人耐受能力强，温度可低些。老年人耐受能力差，温度可高些，提高治疗度，一般在18 左右）

2.持续性冷敷: 24小时持续冷敷（冷敷温度15-18 ）；
也可48小时内冷敷，每次两个小时，间隔一小时（冷敷温度15-18 ）
关节置换、关节镜等术后持续6小时冷敷（冷敷温度15 ）

3.音乐疗法：以心理治疗的理论和方法为基础，运用18首内置国际康复名曲特有的生理、心理效应，通过各种专门设计的音乐行为，经历音乐体验，达到消除心理障碍，改善患者情绪的目的。

4.压力栓疗法：采用持续、间断、多模式脉动水压加压改善微循环，加速组织组织液回流，加速促进患者快速恢复静脉(VTE)的形成。

5.热敷疗法：促进局部血液循环、代谢，利于伤口愈合，缓解肌肉抽筋，促进炎性物质吸收，可选配中药热敷，促进患者快速恢复。