

可调式膝关节矫形器KO膝部矫形器厂家下肢支架固定支具

产品名称	可调式膝关节矫形器KO膝部矫形器厂家下肢支架固定支具
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:均码 型号:KO膝关节矫形器 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

可调式膝关节矫形器KO膝部矫形器厂家下肢支架固定支具

本产品可在表盘刻度内自由调节限位固定，适应需求。可提供支撑，固定，功能活动

锻炼，负荷等作用。调整角度只需几秒，简单便捷，易于操作，大大节省了操作时间，提高工作效率。

膝关节的矫形器主要是通过物理的方式，膝关节内收或者外展，骨骼得到一定的矫正。通过长时间的固定之后，加强功能锻炼之后，能够使关节达到一定的矫形目的。主要是利用机械性的原理，被动的牵拉造成韧带组织松弛，但是效果有待于商榷，因为这种情况较被动。

膝关节发生外伤或进行手术后通常需要采用膝关节支具固定，膝关节支具包括伸直位支具以及关节铰链支具两种。伸直位支具只能使膝关节保持伸直位固定，而铰链支具能够调节关节屈伸活动范围，使膝关节保持稳定的情况下进行屈伸活动，避免关节发生粘连及关节强直，同时还可以进行股四头肌及小腿三头肌力量训练，通常用于膝关节手术后，如膝关节前交叉韧带及后交叉韧带以及半月板缝合术后，对关节功能恢复非常有利。

使用方法：1、可调膝关节支架上端的固定带固定在膝关节以上的大腿处。将膝关节支架下端的固定带固定在小腿

处。

2、固定好大腿固定带和小腿固定带后，将铰链和大腿固定带、小腿固定带相连接固定。

3、将粘扣带通过塑料环和两端固定带对称固定。

4、调整刻度盘刻度到合适角度即可。

我公司主要经营四肢约束带，医用腹带，体位垫，膝关节矫形器，胸腰椎矫形器，医用固定带，颈托，外固定支具