

肋骨固定带三片式单肩双肩可选

产品名称	肋骨固定带三片式单肩双肩可选
公司名称	安平县康博医疗器械有限公司
价格	45.00/件
规格参数	品牌:康隆达 型号:单肩双肩 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	0318-8091006 15127820006

产品详情

备案编号：冀衡食药监械生产备20160064号

产品名称：医用固定带

产品备案号：冀衡械备20160168号

成份：产品由定型全棉布、EPDM减压海绵材料、蓝色ok拉毛布、棉质弹力松紧带、尼龙搭扣和pvc塑料制成。

主要技术指标：连接应牢固，经受拉力80N后不应脱开；塑料制形固定板强度，经受力20N后不应断裂；固定带的(松紧)伸长率不小于30%、回复率不小于80%。

适应症：适用于肋骨骨折、脱位关节部位的矫形固定起到维持对位排列作用固定时用。

规格：XL、L、M、S

肋骨固定带的使用步骤如下：

- 1、嘱患者将双手举起高过头顶，将肋骨固定带的凹面侧面紧贴腋窝，正面紧贴胸壁。
- 2、调整肋骨固定带使患者没有呼吸困难、又不至于太松，然后将魔术粘扣粘好，固定过程中注意让患者配合呼吸。
- 3、肋骨固定带的后面还带有一根蓝色的带子，需要系好蓝色带子，主要是用于防止固定带的下滑。
- 4、固定好后嘱患者呼吸看是否存在呼吸不畅，同时询问患者是否感觉太紧或太松，若太紧可能会影响呼吸和血循，太松达不到固定的作用。

5、肋骨固定带在下床活动时戴上，在床上休息或睡觉时可以去掉。